


ACCU-CHEK® INSIGHT FLEX


Das Accu-Chek Insight Flex Infusionsset dient der subkutanen Infusion von Insulin mit der Accu-Chek Insight Insulinpumpe.

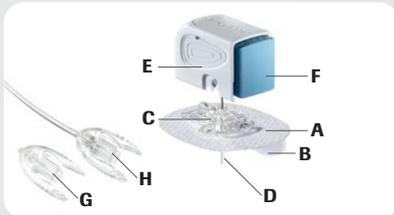

- A** Selbsthaftende Auflage
- B** Schutzfolie der selbsthaftenden Auflage
- C** Kanülengehäuse
- D** Führungsnadel
- E** Nadelgehäuse
- F** Auslöseknopf
- G** Verschlusskappe
- H** Schlauch



1 Waschen Sie sich die Hände gründlich, bevor Sie das Infusionsset aus der Packung nehmen. Wählen Sie eine Einstichstelle und desinfizieren Sie diese gemäß den Anweisungen Ihres Arztes.

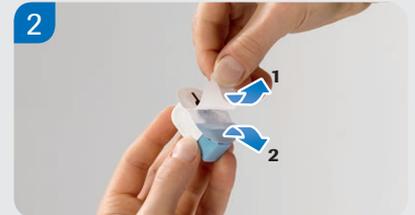

2 Entfernen Sie beide Teile der Schutzfolie von der selbsthaftenden Auflage.




3 Drücken Sie den Auslöseknopf bis zum Anschlag. Die Führungsnadel mit der biegsamen Kanüle klappt heraus.



4 Setzen Sie das Infusionsset im 90° Winkel. Wählen Sie eine Einstichstelle, die nicht auf Taillenhöhe, über Knochen, im Bereich von Narbengewebe, dem Bauchnabel oder einer bereits kürzlich verwendeten Einstichstelle liegt.



5 Drücken Sie die selbsthaftende Auflage fest auf die Haut, um einen sicheren Sitz des Infusionssets zu gewährleisten.

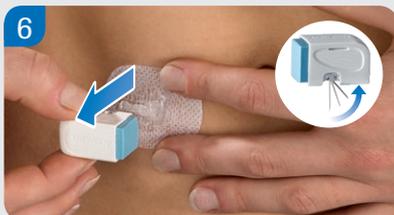

6 Nehmen Sie das Nadelgehäuse mit der Führungsnadel ab, ohne die selbsthaftende Auflage und das Kanülengehäuse von der Haut abzuziehen. Die Führungsnadel klappt automatisch wieder in das Nadelgehäuse ein.



7 Schließen Sie den Schlauch an die Insulinpumpe an und füllen Sie ihn gemäß den Gebrauchsanweisungen Ihrer Insulinpumpe. Achten Sie darauf, dass sich keine Luftblasen im Schlauch befinden.



8 Schließen Sie den gefüllten Schlauch an das Kanülengehäuse an. Verabreichen Sie bei Fortsetzung der Insulinpumpentherapie einen Bolus von 0,7 I.E. zum Füllen des Kanülengehäuses und der Kanüle.

FÜLLMENGE (* I.E. 100 INSULIN)

KANÜLE	Länge:	6 mm	8 mm	10 mm
	Füllmenge:	0,7 I.E.*	0,7 I.E.*	0,7 I.E.*
SCHLAUCH	Länge:	40 cm	70 cm	100 cm
	Füllmenge:	7 I.E.*	11 I.E.*	15 I.E.*

Für detaillierte Anweisungen beachten Sie bitte die Accu-Chek Insight Flex Gebrauchsanweisung. Diese enthält detaillierte Anweisungen und wichtige Sicherheitsinformationen.




TIPPS IM UMGANG MIT ACCU-CHEK INFUSIONSSETS

Um Ihnen den regelmäßigen Wechsel Ihres Infusionssets zu erleichtern, haben wir nützliche Informationen und Tipps für Sie zusammengestellt.

INFUSIONSSTELLE WÄHLEN:

Insulin wird an verschiedenen Körperstellen in unterschiedlicher Geschwindigkeit aufgenommen.

- Im Bauchbereich ist die Aufnahme gut und gleichmäßig.
- An Oberschenkeln und Gesäß ist die Aufnahme etwas langsamer. Die Insulinaufnahme kann sich während körperlicher Aktivität beschleunigen.

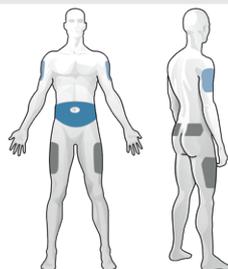

*Infusionsstellen –
Absorptionsrate*

- Schnell
- Normal – schnell
- Langsam

VERMEIDEN SIE FOLGENDE STELLEN FÜR DIE INSULININFUSION:

- 5 cm um den Bauchnabel
- Sehr empfindliche Bereiche
- Unter dem Hosen- oder Rockbund
- Stellen, die Beanspruchung ausgesetzt sind (z.B. Reibung)
- Über Knochen
- Blutgefäße
- Narbengewebe, Operationsnarben
- Prellungen/blau Flecke
- Hautregionen mit vermehrtem verhärtetem Fettgewebe
- Bluterguss
- Körperpiercing
- Tätowierungen

Bei Unsicherheit, welche Infusionsstellen für Sie gut geeignet sind, fragen Sie bitte Ihren Arzt!

INFUSIONSSET WECHSELN:

Wann und wie wechseln?



- Stahlkanülen mindestens alle 2 Tage
- Softkanülen mindestens alle 3 Tage
- Eventuell muss aufgrund von Hautreaktionen oder Abfall der Insulinwirkung häufiger gewechselt werden
- Beim Wechsel immer eine neue Infusionsstelle wählen

Warum regelmäßig wechseln?



Wenn das Infusionsset nicht regelmäßig gewechselt wird erhöht sich die Gefahr für:

- Geringere/unvorhersehbare Insulinwirkung
- Infektion/Abszess an der Infusionsstelle
- Verhärtung der Infusionsstelle
- Verdickung des Unterhautfettgewebes
- Verstopfung der Kanüle/Nadel



INSULINPUMPEN-HOTLINE: 01/277 27-596

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein Medizinprodukt zur Anwendung für Patienten handelt. Vor Gebrauch muss die Gebrauchsinformation beachtet und ärztlicher Rat eingeholt werden.



ACCU-CHEK und ACCU-CHEK INSIGHT FLEX sind Marken von Roche. Alle weiteren Produktnamen und Marken gehören den entsprechenden Eigentümern.
© 2021 Roche Diabetes Care | www.accu-chek.at | Roche Diabetes Care Austria GmbH | 1210 Wien | Engelhorngasse 3

