


# ACCU-CHEK® INSIGHT TENDER

Das Accu-Chek Insight Tender Infusionsset dient der subkutanen Infusion von Insulin mit der Accu-Chek Insight Insulinpumpe.

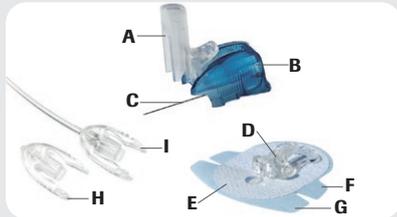

- A** Nadelabdeckung
- B** Haltegriff der Führungsnadel
- C** Softkanüle mit Führungsnadel
- D** Kanülengehäuse
- E** Selbsthaftende Auflage
- F** Hintere Schutzfolie
- G** Vordere Schutzfolie
- H** Verschlusskappe
- I** Schlauch



**1** Waschen Sie sich die Hände gründlich, bevor Sie das Infusionsset aus der Packung nehmen. Wählen Sie eine Einführungsstelle gemäß den Anweisungen Ihres Arztes und desinfizieren Sie die Stelle.



**2** Falten Sie die Nadelabdeckung soweit zurück wie möglich.



**3** Infusionsset in einem Winkel von 20° bis 45° einführen. Wählen Sie eine Einführungsstelle, die nicht auf Taillenhöhe, über Knochen, im Bereich von Narbengewebe, dem Bauchnabel oder einer bereits kürzlich verwendeten Einstichstelle liegt.



**4** Ziehen Sie die vordere Schutzfolie vorsichtig von der selbsthaftenden Auflage ab.



**5** Drücken Sie den vorderen Teil der selbstklebenden Auflage fest auf die Einführungsstelle und achten Sie darauf, dass guter Kontakt zur Haut besteht.



**6** Halten Sie die selbsthaftende Auflage an dieser Stelle fest und ziehen Sie den Griff mit der Führungsnadel seitwärts aus dem Kanülengehäuse.




**7** Drücken Sie die Nadelabdeckung zurück, bis sie in ihrer ursprünglichen Position einrastet, und entsorgen Sie sie.




**8** Ziehen Sie die hintere Schutzfolie vorsichtig von der selbsthaftenden Auflage ab.



**9** Drücken Sie die selbsthaftende Auflage an der Einführungsstelle fest an, damit sie ganzflächig an der Haut haftet.

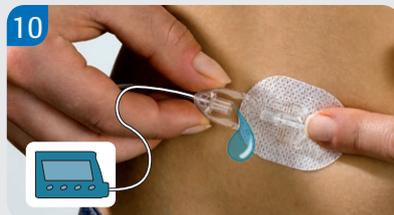

**10** Schließen Sie den Schlauch an die Insulinpumpe an und füllen Sie ihn gemäß den Gebrauchsanweisungen Ihrer Insulinpumpe. Achten Sie darauf, dass sich keine Luftblasen im Schlauch befinden.

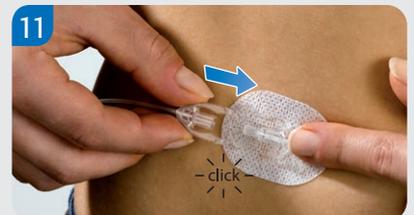

**11** Schließen Sie den Schlauch an das Kanülengehäuse an. Bevor Sie die Pumpentherapie fortsetzen, befüllen Sie das Kanülengehäuse und die Kanüle mit 0,9 I.E. Insulin.

## FÜLLMENGEN SCHLÄUCHE (\* I.E. 100 INSULIN)

SCHLAUCH	Länge:	40 cm	70 cm	100 cm
	Füllmenge:	9 I.E.*	13 I.E.*	17 I.E.*

Für detaillierte Anweisungen beachten Sie bitte die Accu-Chek Insight Tender Gebrauchsanweisung. Diese enthält detaillierte Anweisungen und wichtige Sicherheitsinformationen.




# TIPPS IM UMGANG MIT ACCU-CHEK INFUSIONSSETS

Um Ihnen den regelmäßigen Wechsel Ihres Infusionssets zu erleichtern, haben wir nützliche Informationen und Tipps für Sie zusammengestellt.

## INFUSIONSSTELLE WÄHLEN:

**Insulin wird an verschiedenen Körperstellen in unterschiedlicher Geschwindigkeit aufgenommen.**

- Im Bauchbereich ist die Aufnahme gut und gleichmäßig.
- An Oberschenkeln und Gesäß ist die Aufnahme etwas langsamer. Die Insulinaufnahme kann sich während körperlicher Aktivität beschleunigen.

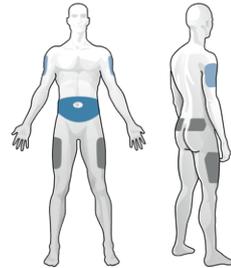

*Infusionsstellen –  
Absorptionsrate*

- Schnell
- Normal – schnell
- Langsam

## VERMEIDEN SIE FOLGENDE STELLEN FÜR DIE INSULININFUSION:

- 5 cm um den Bauchnabel
- Sehr empfindliche Bereiche
- Unter dem Hosen- oder Rockbund
- Stellen, die Beanspruchung ausgesetzt sind (z.B. Reibung)
- Über Knochen
- Blutgefäße
- Narbengewebe, Operationsnarben
- Prellungen/blau Flecke
- Hautregionen mit vermehrtem verhärtetem Fettgewebe
- Bluterguss
- Körperpiercing
- Tätowierungen

**Bei Unsicherheit, welche Infusionsstellen für Sie gut geeignet sind, fragen Sie bitte Ihren Arzt!**

## INFUSIONSSET WECHSELN:

**Wann und wie wechseln?**



- Stahlkanülen mindestens alle 2 Tage
- Softkanülen mindestens alle 3 Tage
- Eventuell muss aufgrund von Hautreaktionen oder Abfall der Insulinwirkung häufiger gewechselt werden
- Beim Wechsel immer eine neue Infusionsstelle wählen

**Warum regelmäßig wechseln?**



Wenn das Infusionsset nicht regelmäßig gewechselt wird erhöht sich die Gefahr für:

- Geringere/unvorhersehbare Insulinwirkung
- Infektion/Abszess an der Infusionsstelle
- Verhärtung der Infusionsstelle
- Verdickung des Unterhautfettgewebes
- Verstopfung der Kanüle/Nadel



**INSULINPUMPEN-HOTLINE: 01/277 27-596**

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein Medizinprodukt zur Anwendung für Patienten handelt. Vor Gebrauch muss die Gebrauchsinformation beachtet und ärztlicher Rat eingeholt werden.



ACCU-CHEK und ACCU-CHEK INSIGHT TENDER sind Marken von Roche. Alle weiteren Produktnamen und Marken gehören den entsprechenden Eigentümern.  
© 2021 Roche Diabetes Care | www.accu-chek.at | Roche Diabetes Care Austria GmbH | 1210 Wien | Engelhorngasse 3

