



ACCU-CHEK® RAPID-D LINK

Das Accu-Chek Rapid-D Link Infusionsset dient der subkutanen Infusion von Insulin mit der Accu-Chek Combo Insulinpumpe.

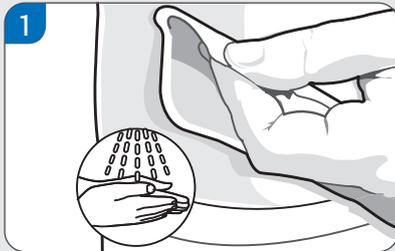


Waschen Sie sich die Hände gründlich, bevor Sie das Infusionsset aus der Packung nehmen. Wählen Sie eine Einstichstelle, die nicht auf Taillenhöhe, über Knochen, im Bereich von Narbengewebe, dem Bauchnabel oder einer bereits kürzlich verwendeten Einstichstelle liegt und desinfizieren Sie diese gemäß den Anweisungen Ihres Arztes.

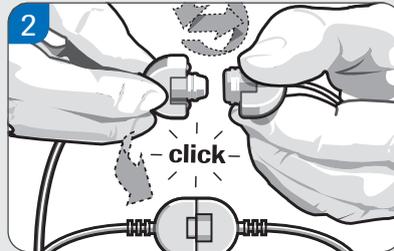


Nehmen Sie Kanüle und Schlauch aus der sterilen Verpackung. Halten Sie die beiden Kupplungshälften so, dass Sie ein Kreuz bilden. Stecken Sie die Teile gerade ineinander.


Koppeln Sie die Teile durch eine Viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn bis zum deutlich spür- und hörbaren Einrasten.

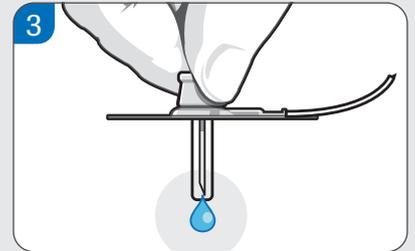


Drehen Sie den Luer-Anschluss fest in das Gewinde des Adapters der Insulinpumpe ein. Füllen Sie das Accu-Chek Rapid-D Link Infusionsset gemäß der Gebrauchsanweisung bis Insulin an der Spitze der Stahlkanüle austritt. Achten Sie darauf, dass sich weder in der Ampulle noch im Schlauch des Accu-Chek Rapid-D Link Infusionssets Luftblasen befinden.

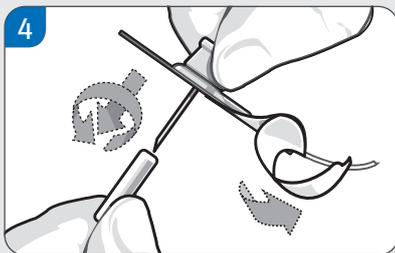

Halten Sie das Accu-Chek Rapid-D Link Infusionsset mit dem Daumen und Zeigefinger der einen Hand am Haltegriff der Kanüle. Ziehen Sie mit der anderen Hand erst die Schutzfolie der selbsthaftenden Auflage ab und drehen Sie dann die Schutzhülle der Stahlkanüle ab.

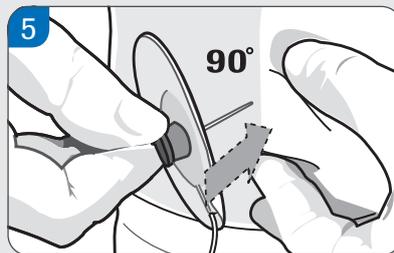

Kanüle schnell und gerade im 90° Winkel in die Hautfalte einstechen. Drücken Sie die selbsthaftende Auflage fest auf die Haut, um einen sicheren Sitz des Infusionssets zu gewährleisten.

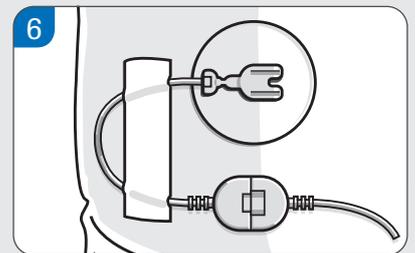

Bilden Sie eine Entlastungsschleife und fixieren Sie diese mit Klebepflaster. Starten Sie nun die Infusion mit der Insulinpumpe.

FÜLLMENGE DES KOMPLETTEN INFUSIONSSETS: (* I.E. 100 INSULIN)

KANÜLE	Länge:	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
SCHLAUCH	Länge:	20 cm	50 cm	70 cm	100 cm
FÜLLMENGE	komplettes Infusionsset:	7 I.E.*	10 I.E.*	13 I.E.*	18 I.E.*

Für detaillierte Anweisungen beachten Sie bitte die Accu-Chek Rapid-D Link Gebrauchsanweisung. Diese enthält detaillierte Anweisungen und wichtige Sicherheitsinformationen.




TIPPS IM UMGANG MIT ACCU-CHEK INFUSIONSSETS

Um Ihnen den regelmäßigen Wechsel Ihres Infusionssets zu erleichtern, haben wir nützliche Informationen und Tipps für Sie zusammengestellt.

INFUSIONSSTELLE WÄHLEN:

Insulin wird an verschiedenen Körperstellen in unterschiedlicher Geschwindigkeit aufgenommen.

- Im Bauchbereich ist die Aufnahme gut und gleichmäßig.
- An Oberschenkeln und Gesäß ist die Aufnahme etwas langsamer. Die Insulinaufnahme kann sich während körperlicher Aktivität beschleunigen.

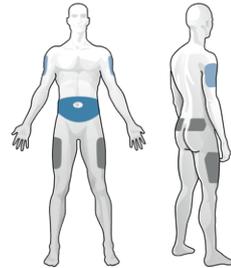

*Infusionsstellen –
Absorptionsrate*

- Schnell
- Normal – schnell
- Langsam

VERMEIDEN SIE FOLGENDE STELLEN FÜR DIE INSULININFUSION:

- 5 cm um den Bauchnabel
- Sehr empfindliche Bereiche
- Unter dem Hosen- oder Rockbund
- Stellen, die Beanspruchung ausgesetzt sind (z.B. Reibung)
- Über Knochen
- Blutgefäße
- Narbengewebe, Operationsnarben
- Prellungen/blau Flecke
- Hautregionen mit vermehrtem verhärtetem Fettgewebe
- Bluterguss
- Körperpiercing
- Tätowierungen

Bei Unsicherheit, welche Infusionsstellen für Sie gut geeignet sind, fragen Sie bitte Ihren Arzt!

INFUSIONSSET WECHSELN:

Wann und wie wechseln?



- Stahlkanülen mindestens alle 2 Tage
- Softkanülen mindestens alle 3 Tage
- Eventuell muss aufgrund von Hautreaktionen oder Abfall der Insulinwirkung häufiger gewechselt werden
- Beim Wechsel immer eine neue Infusionsstelle wählen

Warum regelmäßig wechseln?



Wenn das Infusionsset nicht regelmäßig gewechselt wird erhöht sich die Gefahr für:

- Geringere/unvorhersehbare Insulinwirkung
- Infektion/Abszess an der Infusionsstelle
- Verhärtung der Infusionsstelle
- Verdickung des Unterhautfettgewebes
- Verstopfung der Kanüle/Nadel



INSULINPUMPEN-HOTLINE: 01/277 27-596

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein Medizinprodukt zur Anwendung für Patienten handelt. Vor Gebrauch muss die Gebrauchsinformation beachtet und ärztlicher Rat eingeholt werden.



ACCU-CHEK und ACCU-CHEK RAPID-D LINK sind Marken von Roche. Alle weiteren Produktnamen und Marken gehören den entsprechenden Eigentümern.
© 2021 Roche Diabetes Care | www.accu-check.at | Roche Diabetes Care Austria GmbH | 1210 Wien | Engelhorngasse 3

