
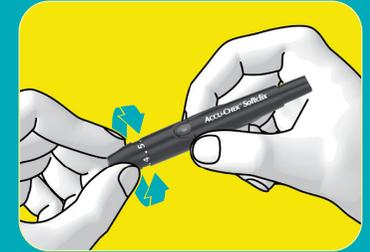
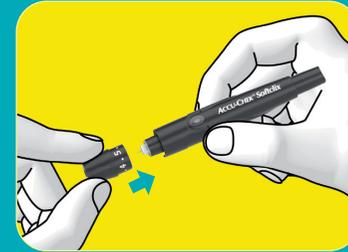
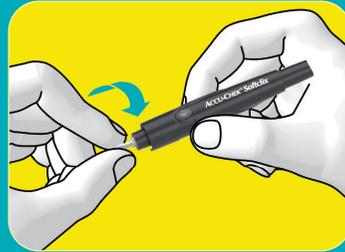
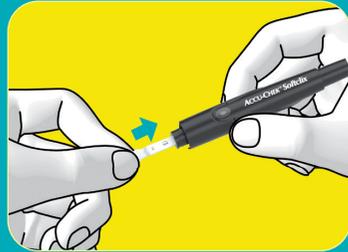





# EINFACH MESSEN. EINFACH INSTANT.

NEU

## STECHHILFE VORBEREITEN

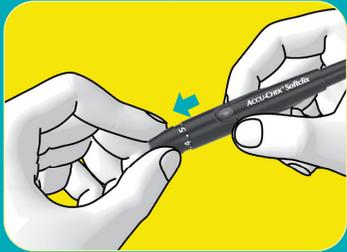

## BLUTZUCKERMESSUNG DURCHFÜHREN

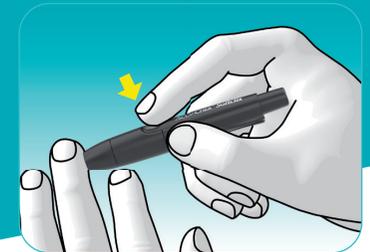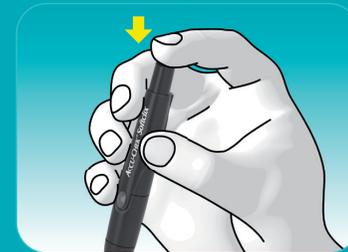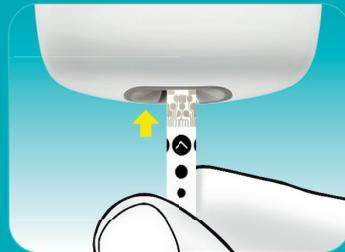

**Diabetes-Hotline: 01/277 27-355**  
Mo. bis Fr. 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr



Informationen, Trainingsvideo, Accu-Chek®  
Instant Gebrauchsanweisung finden Sie auf:  
[www.accu-chek.at](http://www.accu-chek.at)

## EINFACH MESSEN. EINFACH INSTANT.

### AUSZUG DER WICHTIGSTEN ANZEIGENSYMBOLS UND FEHLERMELDUNGEN



#### Einstellung Zeit & Datum:

Drücken Sie ▲ um das Gerät einzuschalten. Halten Sie ▼ gedrückt, bis **set-up** auf dem Display angezeigt wird. Der Stundenwert blinkt. Wählen Sie mit ▲ und ▼ den Stundenwert aus. Halten Sie ▲ gedrückt um den Wert zu bestätigen und zum nächsten Feld zu springen. Wiederholen Sie den Vorgang. Halten Sie ▼ gedrückt um die Änderungen zu speichern.



**(E-7)** In der Geräteelektronik ist ein Fehler aufgetreten. Entnehmen Sie die Batterien, drücken Sie eine der Tasten des Messgeräts und halten Sie diese mindestens 2 Sek. lang gedrückt; setzen Sie die Batterien danach wieder ein.



**(E-12)** Die Ascorbatkonzentration in Ihrem Blut könnte erhöht sein. Wenden Sie sich an Ihren Arzt.




**(E-8)** Die Umgebungstemperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs für das System. Gehen Sie an einen Ort mit angemessener Betriebsumgebung. Versuchen Sie bitte nicht, das Messgerät künstlich zu erwärmen oder zu kühlen.



**(E-13)** Im Teststreifenschacht könnte sich Flüssigkeit oder Fremdmaterial befinden.



**(E-9)** Die Batterien sind möglicherweise leer. Wenn Sie sich in einer kalten Umgebung befinden, gehen Sie an einen Ort mit gemäßigter Temperatur. Erscheint die Fehlermeldung nach dem Wechseln der Batterien erneut, entnehmen Sie die Batterien, drücken Sie eine der Tasten des Messgeräts und halten Sie diese mindestens 2 Sek. lang gedrückt; setzen Sie die Batterien danach wieder ein.

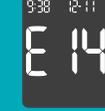

**(E-14)** In der Geräteelektronik ist ein Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich bitte an Roche.



**(E-10)** Die Uhrzeit und das Datum sind möglicherweise falsch eingestellt.



**(HI)** Der Blutzuckermesswert liegt möglicherweise oberhalb des Messintervalls des Systems.



**(E-11)** Der Teststreifen ist eventuell beschädigt.



**(LO)** Der Blutzuckermesswert liegt möglicherweise unterhalb des Messintervalls des Systems.



**(E-1)** Der Teststreifen ist eventuell beschädigt, wurde nicht richtig eingeführt oder wurde bereits verwendet.



**(E-3)** Es ist ein Fehler am Messgerät oder Teststreifen aufgetreten. Wiederholen Sie die Blutzuckermessung.



**(E-4)** Die in den Teststreifen eingesogene Menge Blut oder Kontrolllösung war zu gering oder wurde nach Beginn der Messung eingesogen.



**(E-6)** Blut oder Kontrolllösung wurden in den Teststreifen eingesogen, bevor **Tropfen auftragen** auf dem Display erschien.



Kompatibel mit mySugr

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier angeführten Produkten um Medizinprodukte zur Anwendung für Patienten handelt. Vor Gebrauch dieser Produkte muss die Gebrauchsinformation beachtet und ärztlicher Rat eingeholt werden.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT, ACCU-CHEK SOFTCLIX und MYSUGR sind Marken von Roche. © 2021 Roche Diabetes Care | www.accu-chek.at | Roche Diabetes Care Austria GmbH | 1210 Wien | Engelhorngasse 3