

DAS ACCU-CHEK® MOBILE BLUTZUCKERMESSSYSTEM

DAS NEUE TRAUMPAAR. Die Basis ist Kommunikation. Darum spricht Accu-Chek Mobile jetzt Bluetooth®. Damit alles klar ist.



WIRELESS ADAPTER



VERBINDEN UND PROFITIEREN:

Jetzt Accu-Chek Mobile mit der **mySugr App** verbinden und die **Pro Version KOSTENLOS** freischalten.

EINFACHES MESSEN - IN NUR 4 SCHRITTEN:



1
Öffnen Sie den Spitzenschutz. Das Messgerät schaltet sich ein.



2
Stechen Sie Ihren Finger mit der Stechhilfe, um Blut zu gewinnen.



3
Tragen Sie den Blutstropfen auf das Testfeld auf.



4
Lesen Sie den Messwert ab und schließen Sie den Spitzenschutz.

ACCU-CHEK MOBILE MIT DER MYSUGR APP VERBINDEN:



1
Abdeckung vom **USB-Stecker** entfernen. Möglicherweise müssen Sie etwas Kraft anwenden.




2
Stecken Sie jetzt einfach den Adapter in die USB-Schnittstelle des Blutzuckermessgerätes.



3
Aktivieren Sie **Bluetooth®** auf Ihrem Smartphone.



4
Drücken Sie den Knopf auf dem Adapter. Die grüne LED sollte schnell blinken.

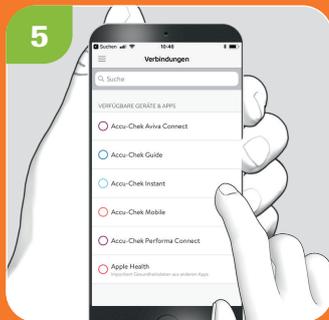

5
Erstmaliges Verbinden: Öffnen Sie die mySugr App. Gehen Sie ins **Menü** und klicken Sie auf **„Verbindungen“**. Wählen Sie „Accu-Chek Mobile“.



6
Geben Sie nun die **letzten sechs Zahlen der Seriennummer** des Adapters ein. Diese sind auf der Innenseite des Adapters als auch auf der Verpackung abgebildet.



7
Der Datentransfer startet automatisch. Die grüne LED blinkt währenddessen langsam. Sobald der Datentransfer beendet ist, hört die LED auf zu blinken und leuchtet konstant grün. Der Adapter schaltet sich automatisch ab.



8
Bei der regulären Blutzuckermessung Bluetooth® auf dem Smartphone aktiviert lassen. Knopf auf dem Adapter drücken, um den Datentransfer zu starten. Die grüne LED blinkt schnell. Nach dem Datentransfer schaltet sich der Wireless Adapter automatisch ab.

Laden Sie die mySugr App **KOSTENLOS** herunter:

BESTELLEN SIE DEN ADAPTER KOSTENLOS im Accu-Chek +Club Bestellcenter auf accu-chek.at

DIABETES-HOTLINE 01/277 27-355

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein Medizinprodukt zur Anwendung für Patienten handelt. Vor Gebrauch muss die Gebrauchsinformation beachtet und ärztlicher Rat eingeholt werden.

Kompatibel mit mySugr

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE, FASTCLIX und MYSUGR sind Marken von Roche. Alle weiteren Produktnamen und Marken gehören den entsprechenden Eigentümern. © 2021 Roche Diabetes Care | www.accu-chek.at | Roche Diabetes Care Austria GmbH | 1210 Wien | Engelhornstraße 3