

Einfaches Messen - in nur 4 Schritten



Öffnen Sie den Spitzenschutz. Das Messgerät schaltet sich ein.



Stechen Sie Ihren Finger mit der Stechhilfe, um Blut zu gewinnen.



Tragen Sie den Blutstropfen auf das Testfeld auf.




Lesen Sie den Messwert ab und schließen Sie den Spitzenschutz.

4 wichtige Hinweise für die richtige Handhabung




Waschen Sie Ihre Hände mit warmem Wasser und Seife. Trocknen Sie Ihre Hände gut ab, bevor Sie Blut aus einem sauberen und trockenen Finger entnehmen.

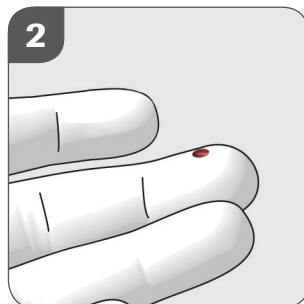

Verwenden Sie immer einen kleinen, frischen, **gut geformten** und nicht verlaufenen **Blutstropfen**.



Mit den Abstandhaltern soll das Gerät so gehalten werden, dass **Sie den Testbereich sehen können** wenn Sie einen Blutstropfen auftragen. Halten Sie Ihren **Finger sanft an die Abstandhalter** damit **nur der Blutstropfen mit der Mitte der Auftragsfläche in Berührung kommt**.

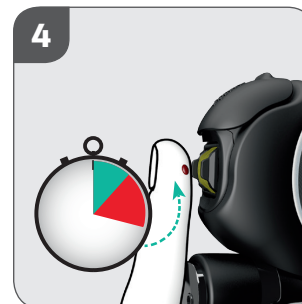

Tragen Sie das Blut sofort auf das Testfeld auf, nachdem Sie den Tropfen erzeugt haben. Nehmen Sie den Finger vom Testfeld weg, sobald der Signalton ertönt (falls aktiviert) und „Messung läuft“ auf dem Display erscheint.

Accu-Chek® Mobile
Blutzuckermesssystem
Streifenfrei. Einfach.
Alles in Einem.



VERBESSERTETE
TESTKASSETTE



Jetzt registrieren auf
www.accu-chek.at



Nur eine richtige Handhabung führt zu korrekten Messresultaten, die für eine angemessene Therapieempfehlung notwendig sind. Folgen Sie deshalb sorgfältig den Anleitungen.

ACCUCHEK®


Neue Kassette einlegen nachdem 50 Tests verbraucht sind



Öffnen Sie den Spitzenschutz vollständig bis zum Anschlag. Nur dann können Sie das Kassettenfach öffnen und die Testkassette einlegen.



Schieben Sie den Entriegelungsknopf für den Kassettenfachdeckel nach oben.

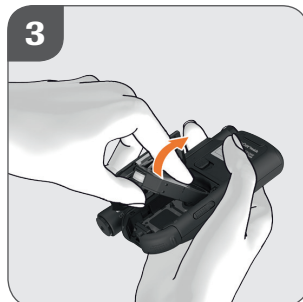

Nehmen Sie die verbrauchte Testkassette aus dem Kassettenfach.



Legen Sie eine neue Testkassette in das Messgerät ein. Schließen Sie den Kassettenfachdeckel und den Spitzenschutz.

Neue Lanzettentrommel nach dem Verbrauch von 6 Lanzetten einsetzen



Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe ab und die benutzte Lanzettentrommel heraus.



Setzen Sie eine neue Lanzettentrommel ein (das weiße Ende zuerst) und setzen Sie die Kappe wieder auf die Stechhilfe.



Drehen Sie die Kappe, bis die gewünschte Stechtiefe an der Markierung steht. Beginnen Sie mit einer mittleren Stechtiefe, z. B. 3.



Bereiten Sie die Stechhilfe für die nächste Blutentnahme vor: Bewegen Sie den Hebel in Richtung ① und wieder zurück auf ②.

Accu-Chek® Mobile
Blutzuckermesssystem
Streifenfrei. Einfach.
Alles in Einem.



You Tube

Mehr Infos
zu Accu-Chek Mobile auch unter
www.youtube.com/AccuChekAustria

ACCUCHEK, ACCUCHEK MOBILE und FASTCLIX
sind Marken von Roche. © 2018 Roche.

www.accu-chek.at/mobile

Roche Diabetes Care Austria GmbH
1200 Wien, Handelskai 94-96

Diabetes-Hotline 01/277 27-355



Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier angeführten Produkten um Medizinprodukte zur Anwendung für Patienten handelt. Vor Gebrauch dieser Produkte muss die Gebrauchsinformation beachtet und ärztlicher Rat eingeholt werden.

ACCUCHEK®