

Vertraue deinem Fingerspitzengefühl!



**Accu-Chek Softclix -
Blutzuckermessen kann jetzt so sanft sein!**

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Besonders schmerzarm
- Hygienischer, einfacher und sicherer Lanzettenauswurf
- Einfach in der Anwendung - Spannen mit einer Hand



Erleichtern Sie sich den
regelmäßigen **Lanzettenwechsel!**

**Warum bei jedem
Stechen die Lanzette
wechseln?**



Neue Lanzetten sind scharf und glatt und reizen die Haut kaum. Durch mehrfachen Gebrauch einer Lanzette kann die Spitze jedoch deformiert und das Stechen erschwert werden. Dies führt zu Reizungen und Verhornungen und kann das Gefühl in den Fingern reduzieren.

**Machen Sie die
Accu-Chek Softclix Erfahrung!**

Vertraue deinem Fingerspitzengefühl!



Lanzettenwechsel



- Kappe abziehen



- Auswerfer nach vorne schieben



- Neue Lanzette einschieben



- Schutzkappe der Lanzette abdrehen



- Kappe wieder aufstecken

Blutgewinnung



- Eine der 11 Einstechtiefen auswählen



- Spannkнопf drücken



- Auslöseknopf betätigen

Bei jedem Stechen Lanzette wechseln!

