

ACCUCHEK® Guide

DE

HIERMIT BEGINNEN

KURZANLEITUNG

Unter www.accu-chek.com erfahren Sie, welche Diabetes Management Apps mit Ihrem Blutzuckermessgerät kompatibel sind.

ACCUCHEK®

WARNUNG


Gefahr lebensbedrohlicher Verletzungen
Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Gefahr schwerwiegender gesundheitlicher Vorkommnisse
Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung des Accu-Chek Guide Blutzuckermessgeräts. Die Gebrauchsanweisung enthält wichtige Hinweise zur Handhabung sowie zusätzliche Informationen.

Infektionsgefahr
Bei der Entnahme eines Blutropfens können die Stechhilfe und die Kappe mit Blut in Berührung kommen. Die Stechhilfe ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.

HINWEIS

- Halten Sie immer einen Satz Batterien als Vorrat bereit.
- Die Batterieleistung kann in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Temperatur und Batteriehersteller variieren.

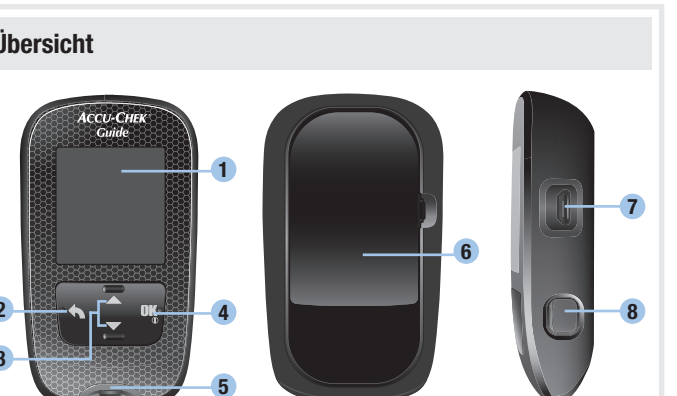

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1 Display | 5 Beleuchteter Teststreifeneinschub |
| 2 Zurück-Taste | 6 Batteriefachdeckel |
| 3 Auf- und Ab-Tasten | 7 Micro-USB-Anschluss |
| 4 Ein/Aus/Set/OK-Taste | 8 Teststreifen-Auswerfer |

Einstellen von Sprache und Zeitformat




Drücken Sie kurz auf **OK**, um das Messgerät einzuschalten. **Language** (Sprache) erscheint auf dem Display. Drücken Sie auf **English** oder **简体中文**, um die gewünschte Sprache auszuwählen. Drücken Sie auf **OK**.




Zeitformat erscheint auf dem Display. Drücken Sie auf **12 Stunden** oder **24 Stunden**, um die gewünschte Einstellung zu speichern und anschließend zum **Hauptmenü** zurückzukehren.


Vorbereiten der Stechhilfe

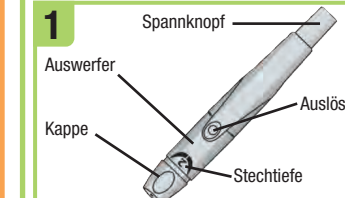


Machen Sie sich mit der Accu-Chek Softclix Stechhilfe vertraut.

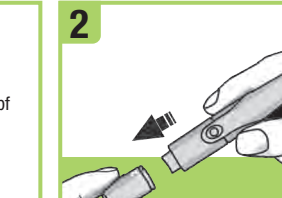

Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe gerade ab. Drehen Sie die Kappe nicht.

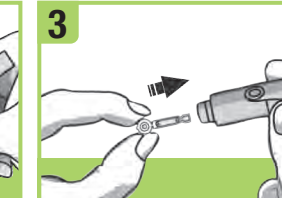

Stecken Sie eine Lanzette in die Stechhilfe, bis die Lanzette mit einem Klick einrastet.

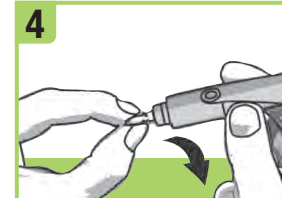

Drehen Sie die Schutzkappe der Lanzette ab.



Setzen Sie die Kappe wieder auf die Stechhilfe. Achten Sie darauf, dass die Positionierungskerbe in der Kappe auf einer Linie mit der Positionierungslinie auf der Stechhilfe liegt.



Stellen Sie an der Stechhilfe eine für Sie passende Stechtiefe ein. Beginnen Sie mit Stufe 2. Je nach Gewebedicke kann ein höherer Wert erforderlich sein.




Drücken Sie den Spannkopf bis zum Anschlag, wie bei einem Kugelschreiber. Drücken Sie nicht den Auslöseknopf, solange Sie noch den Spannkopf drücken.



Die Stechhilfe kann verwendet werden, wenn in dem Auslöseknopf ein gelbes Feld erscheint. Verwenden Sie die Stechhilfe erst unmittelbar vor der Blutentnahme.


Durchführen einer Blutzuckermessung

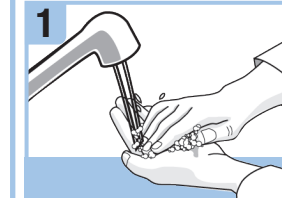


Waschen und trocknen Sie Ihre Hände, bevor Sie eine Blutzuckermessung durchführen.



Überprüfen Sie das Haltbarkeitsdatum auf der Teststreifendose. Verwenden Sie keine Teststreifen, deren Haltbarkeitsdatum überschritten ist.

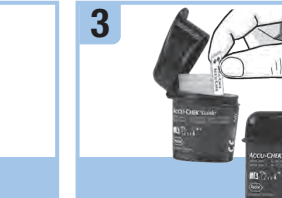


Entnehmen Sie einen Teststreifen aus der Teststreifendose. Verschließen Sie den Deckel wieder fest.

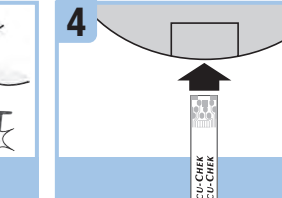

Schieben Sie den Teststreifen mit den metallischen Kontakten voran in das Messgerät ein.




Das Messgerät schaltet sich ein. **Messung wird vorbereitet** erscheint auf dem Display.

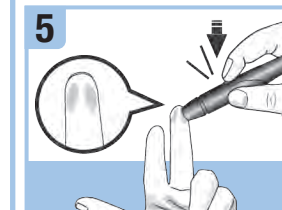

Drücken Sie die Stechhilfe fest gegen die Seite Ihrer Fingerbeere und drücken Sie den gelben **Blutaufragsfläche** des Teststreifens den Blutropfen. Tragen Sie das Blut nicht auf die Oberseite des Teststreifens auf.



Der Messwert erscheint nach weniger als 4 Sekunden auf dem Display.

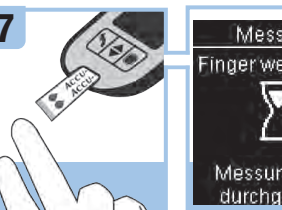

Nehmen Sie Ihren Finger vom Teststreifen weg, sobald **Messung wird durchgeführt** auf dem Display erscheint.



Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe ab. Halten Sie die Stechhilfe so, dass das untere Ende der Stechhilfe mit der Lanzette von Ihnen wegzeigt. Schieben Sie den Auswerfer nach vorn, um die Lanzette auszuwerfen.



Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe ab. Halten Sie die Stechhilfe so, dass das untere Ende der Stechhilfe mit der Lanzette von Ihnen wegzeigt. Schieben Sie den Auswerfer nach vorn, um die Lanzette auszuwerfen.

LETZTE ÜBERARBEITUNG: 2021-07

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

ACCUCHEK, ACCUCHEK GUIDE und SOFTCLIX sind Marken von Roche.

© 2021 Roche Diabetes Care

07802994061A-1021
07802994061(01)-1021

