


Schnelles und einfaches Messen - in nur 4 Schritten!



1. Spitzenschutz öffnen



2. Hände waschen und Blut gewinnen

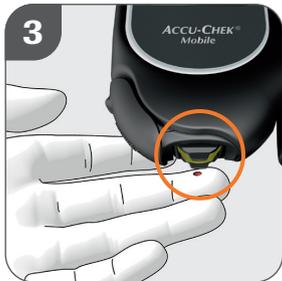

3. Gut geformten, nicht verschmierten Blutstropfen leicht in der Mitte des Testfeldes auftragen



4. Ergebnis ablesen, Spitzenschutz schließen

Accu-Chek Trainingsvideos:

Gerätehandhabung einfach erlernen!

Mit den Trainingsvideos einfach zu Hause die Durchführung der Blutzuckermessung sowie der ersten Geräteeinstellungen unter [youtube.com/AccuChekAustria](https://www.youtube.com/AccuChekAustria) erlernen.



Sind Sie bereit für streifenfreies Messen mit der Testkassette?

Das Accu-Chek Mobile System macht Blutzuckerkontrolle einfacher:

- 50 Tests am laufenden Band
- Keine Handhabung oder Entsorgung einzelner Teststreifen
- Nur ein Klick zum Spannen & Auslösen mit der Accu-Chek Fastclix Stechhilfe
- 6 Lanzetten in einer Trommel – ohne Sichtkontakt oder Berührung mit einzelnen Lanzetten
- Messen in nur 4 Schritten

Wer hätte gedacht, dass Blutzuckermessen so einfach sein kann? **Streifenfrei. Einfach. Alles in Einem.**

Referenz: 1. Baumstark A et al., J Diabetes Sci Technol. 2018;12:407-411.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier angeführten Produkten um Medizinprodukte zur Anwendung für Patienten handelt. Vor Gebrauch dieser Produkte muss die Gebrauchsinformation beachtet und ärztlicher Rat eingeholt werden.



ACCUCHEK, ACCUCHEK MOBILE, CLIXMOTION, FASTCLIX und MYSUGR sind Marken von Roche. Alle weiteren Produkt- und Marken gehören den entsprechenden Eigentümern. © 2020 Roche Diabetes Care.

www.accu-chek.at
Roche Diabetes Care Austria GmbH
1200 Wien, Handelskai 94-96
Diabetes-Hotline 01/277 27-355



ACCUCHEK®

Keine Teststreifen: Accu-Chek® Mobile. Erleichtert das Alltagsleben von Insulinverwendern.



Erstattung für alle Formen der Insulintherapie



ACCUCHEK®

Streifenfrei messen?

Stellen Sie sich vor, wie es wäre, Ihren Blutzucker zu messen, ohne jedes Mal einen Teststreifen zu suchen und einzulegen. Mit dem neuen Accu-Chek Mobile System ist das möglich.

Mit 50 Tests am laufenden Band entfällt die Handhabung einzelner Teststreifen und es ist für Sie einfacher zu messen.

Einfache Blutzuckerkontrolle mit weniger Abfall.

Das Accu-Chek Mobile System beinhaltet eine innovative Testkassette mit 50 Tests am laufenden Band. Somit entfallen das Hantieren und die Entsorgung von einzelnen Teststreifen, wodurch die komfortable Blutzuckermessung zu jeder Zeit und überall ermöglicht wird.

Bringt alles für die Blutzuckermessung mit.

Die Accu-Chek Fastclix Stechhilfe ist in das Accu-Chek Mobile System integriert und unterstützt Sie durch Spannen und Auslösen mit einem einzigen Klick bei der einfachen Blutgewinnung. Der Lanzettenwechsel nach der Blutgewinnung ist mit Accu-Chek Fastclix dank der integrierten Lanzettentrommel mit 6 Lanzetten mit einem einzigen Griff erledigt.

AUTOMATISCHES ÜBERTRAGEN AN MYSUGR



Laden Sie die mySugr App kostenlos herunter:



WIRELESS ADAPTER

Bestellen Sie den Adapter **KOSTENLOS** im Accu-Chek® Club Bestellcenter auf accu-chek.at



VERBESSERTER TESTKASSETTE

Testkassette

- Genauere Testergebnisse¹
- Einfaches Auftragen von Blut und verbesserte Handhabung
- 50 Tests am laufenden Band
- Keine Handhabung oder Entsorgung einzelner Teststreifen



NUR 1 KLICK ZUM SPANNEN & AUSLÖSEN

Lanzettentrommel

- Einfache Blutgewinnung mit nur einem Klick
- Trommel mit 6 Lanzetten – bequem und hygienisch
- „Clixmotion“-Technologie mit 11 individuellen Stechtiefen

