

NEU:
Jetzt auch mit
Kanülenlänge 13 mm



ACCU-CHEK® TenderLink

Das Infusionsset für aktive Pumpenträger

- **Flexibel:** Mit biegsamer Teflonkanüle
- **Aktiv:** Schräger Einführungswinkel, macht jede Bewegung mit
- **Diskret:** Abgeflachtes Kanülenegehäuse mit selbsthaftender Auflage
- **Sicher:** Mit Sichtfenster zur optimalen Kontrolle der Einstichstelle

Accu-Chek® Infusionssets – passend für jeden Anspruch!


Fragen zu Accu-Chek® Pumpen und Accu-Chek® Infusionssets
beantworten wir unter 01/27787-596



www.accu-chek.at
Roche Diagnostics GmbH
A-1211 Wien

ACCU-CHEK®

Leben. So wie ich es will.

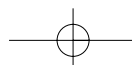

ACCU-CHEK® TenderLink

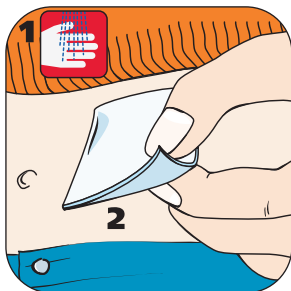


Bild 1

1) Hände waschen. 2) Einstichstellen in der vorderen und seitlichen Bauchwand regelmäßig wechseln, damit sich die Hautoberfläche erholen kann und Verhärtungen vermieden werden. Abstand um den Nabel und Narben lassen. Haut desinfizieren und trocknen lassen.

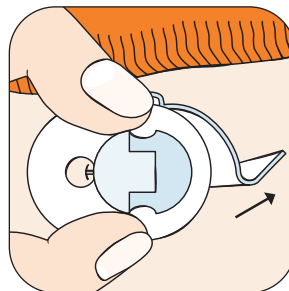


Bild 4

Entfernen Sie die Schutzfolie zur Gänze und drücken Sie das Pflaster fest an. Das Infusionsset haftet nun fest und flach auf Ihrer Haut.

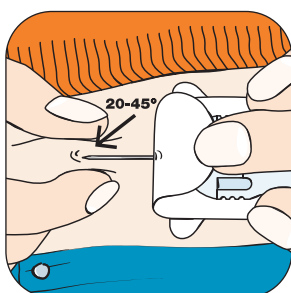


Bild 2

1) Den vorderen Teil der Schutzfolie und die Schutzhülle der Führungsnadel entfernen. 2) Die selbsthaftende Auflage mit dem Zeigfinger zurückklappen, eine Hautfalte bilden und die Führungsnadel schnell im Winkel 20-45° einführen.

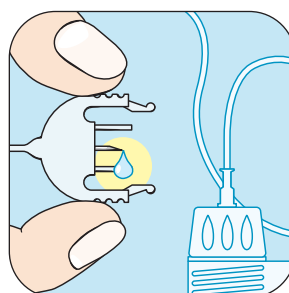


Bild 5

Befestigen Sie das Accu-Chek® TenderLink Infusionsset am Luerlock-Anschluss der Insulinpumpe. Seitenclips zusammendrücken und Schutzkappe abziehen. Den Schlauch füllen bis Insulin aus der Verbindungsnadel tropft. In Ampulle und Schlauch dürfen keine Luftblasen sein.

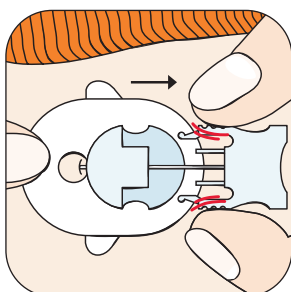


Bild 3

Drücken Sie einen Finger auf das Sichtfenster. Die Seitenclips zusammendrücken und die Führungsnadel aus der Haut ziehen.

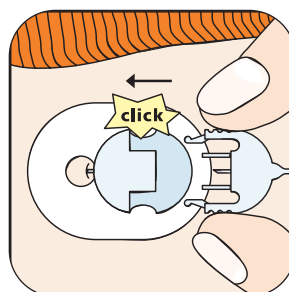


Bild 6

Den Insulingefüllten Schlauch mit der neu gesetzten Kanüle verbinden. Sie hören einen "Klick". Den Hohlraum des Kanülengehäuses mit einem Bolus von 0,5-1,0 Einheiten U 100 Insulin füllen. Insulinpumpe starten.

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Accu-Chek® TenderLink Infusionssets für genauere Informationen.

Kanülenlänge	Schlauchlänge
13, 17 mm	30, 60, 80, 110 cm

Accu-Chek®, Accu-Chek® TenderLink, sind Marken eines Unternehmens der Roche-Gruppe.



www.accu-chek.at
Roche Diagnostics GmbH
A-1211 Wien

ACCU-CHEK®

Leben. So wie ich es will.