



ACCU-CHEK® FlexLink

Von Anfang an einfach.

- **Flexibel:** Mit biegsamer Teflonkanüle
- **Bequem:** Durch hohen Tragekomfort
- **Einfach:** Mit dem blauen Adaptergriff oder Accu-Chek® LinkAssist noch einfacher senkrecht setzen

Accu-Chek® Infusionssets – passend für jeden Anspruch!

Fragen zu Accu-Chek® Pumpen und Accu-Chek® Infusionssets beantworten wir unter 01/27787-596



automatische Setzhilfe
Accu-Chek® LinkAssist



www.accu-chek.at
Roche Diagnostics GmbH
A-1211 Wien

ACCU-CHEK®

Leben. So wie ich es will.

ACCU-CHEK® FlexLink



Bild 1

1) Hände waschen. 2) Einstichstellen in der vorderen und seitlichen Bauchwand regelmäßig wechseln, damit sich die Hautoberfläche erholen kann und Verhärtungen vermieden werden. Abstand um den Nabel und Narben lassen. Haut desinfizieren und trocknen lassen.

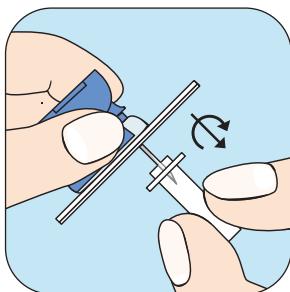


Bild 2

Mit Daumen und Zeigefinger die Accu-Chek® FlexLink Kanüle am blauen Adaptergriff festhalten und die Schutzhülle durch gleichzeitiges Drehen und Ziehen entfernen.

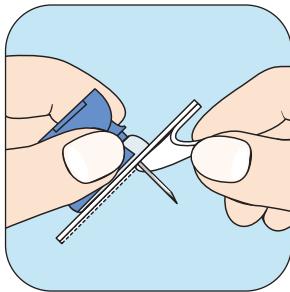


Bild 3

Entfernen Sie beide Teile der Schutzfolie von der Klebefläche.

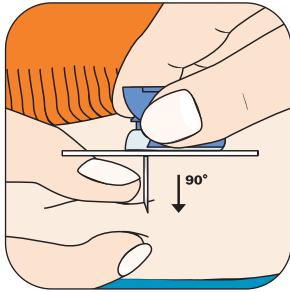


Bild 4

Kanüle schnell und gerade im 90° Winkel in die Hautfalte einstechen.

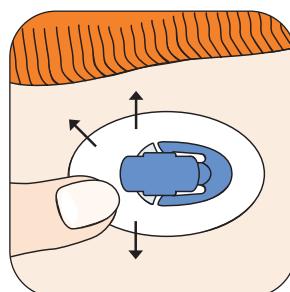


Bild 5

Drücken Sie das Pflaster fest an. Das Infusionset haftet nun fest und flach auf Ihrer Haut.

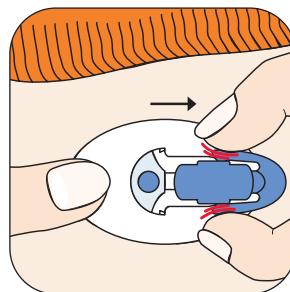


Bild 6

Drücken Sie mit einer Hand auf das Pflaster und mit der anderen Hand die Seitenclips des blauen Adaptergriffs zusammen, um diesen vom Kanülengehäuse zu entfernen.

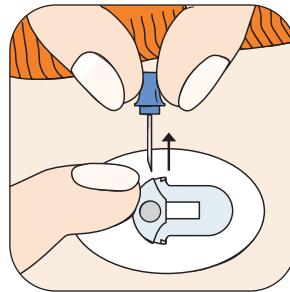


Bild 7

Zum Entfernen der Führungs- nadel das Kanülengehäuse fest- halten. Einen Finger auf das Ge- häuse legen und die Nadel an ihrem Haltegriff gerade herausziehen.

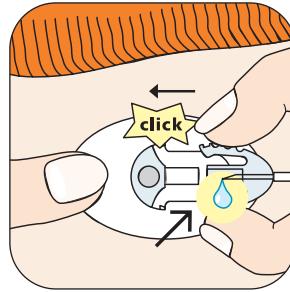


Bild 8

Luer-Anschluss in den Adapter der Pumpe eindrehen. Katheter- füllprogramm starten bis Insulin an der Spitze der Verbindungs- nadel herauströpfpt. Den Insulin- gefüllten Schlauch mit der neuen Kanüle verbinden. Sie hören einen „Klick“. Den Hohl- raum des Kanülengehäuses mit einem Bolus von 1.0 Einheiten U 100 Insulin füllen. Insulin- pumpe starten.

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Accu-Chek® FlexLink Infusionssets für genauere Informationen.

Kanülenlänge	Schlauchlänge
8, 10 mm	30, 60, 80, 110 cm

Accu-Chek®, Accu-Chek® FlexLink,
sind Marken eines Unternehmens der Roche-Gruppe.



www.accu-cheat.at
Roche Diagnostics GmbH
A-1211 Wien