

Handhabungsschritte für die Accu-Chek® LinkAssist Setzhilfe zum Setzen des Accu-Chek® FlexLink Infusionssets

Vor der Anwendung bitte Hände waschen. Gemäß der ärztlichen Anweisung eine geeignete Körperstelle auswählen, die nicht auf Taillenhöhe, über Knochen, im Bereich von Narbengewebe, Nabel oder einer kürzlich zuvor benutzten Einführungsstelle liegt. Diese Stelle desinfizieren und vor dem Setzen des Infusionssets das Desinfektionsmittel trocknen lassen.



1 Das Spannelement (grau) der Setzhilfe in den Fußteil (blau) hineinschieben.



7 Mit einer Hand das Fußteil der Setzhilfe festhalten und mit der anderen Hand das Spannelement nach oben bis zum spürbaren Anschlag herausziehen.



2 Die Setzhilfe ist nun vorgespannt. Bei diesem Handhabungsschritt wird der Sicherungshebel arretiert und die Setzhilfe automatisch gesichert.



8 Die Setzhilfe auf die ausgewählte, desinfizierte Hautstelle aufsetzen und durch Umlegen des Sicherungshebels entsichern. Den Auslöseknopf drücken.



3 Das Infusionsset mit Daumen und Zeigefinger an der Schutzhülle halten und mit dem blauen Adaptergriff voran von unten in die Öffnung einsetzen, bis es spürbar einrastet.




9 Den korrekten Sitz der Auflage überprüfen und die selbsthaftende Auflage fest auf die Haut drücken, um einen sicheren Sitz des Infusionssets zu gewährleisten.




4 Korrekt eingeführtes Infusionsset. Bemerkung: Die Perforierung in der Schutzfolie der selbsthaftenden Auflage führt zum Kupplungsbereich für Kanüle und Schlauch.



10 Die selbsthaftende Auflage festhalten. Die Seitenclips des blauen Adaptergriffs vorsichtig zusammendrücken und diesen vom Kanülengehäuse entfernen.

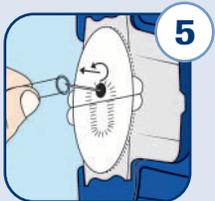

5 Vorsichtig die transparente Schutzhülle des Infusionssets durch gleichzeitiges Drehen und Ziehen entfernen.

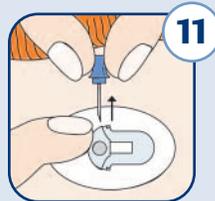

11 Zum Entfernen der Führungsnadel das Kanülengehäuse am Körper festhalten. Einen Finger auf das Kanülengehäuse legen und die Führungsnadel an ihrem Haltegriff gerade herausziehen.



6 Beide Teile der Schutzfolie von der selbsthaftenden Auflage abziehen.



12 Den vorbereiteten* Schlauch an der vorher fixierten Kanüle ankoppeln. Die Verbindung muss hör- und spürbar einrasten. Den Hohlraum des Kanülengehäuses mit einem Bolus von 1,0 Einheiten (U 100 Insulin) füllen.

* Vorbereitung des Schlauchs: Den Luer-Anschluss in den Adapter der Insulinpumpe eindrehen. Den Schlauch gemäß der Bedienungsanleitung füllen, bis das Insulin an der Spitze der Verbindungsnadel heraustropft. Weder in der Ampulle noch im Schlauch des Accu-Chek® FlexLink dürfen sich Luftblasen befinden. Für Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und detailliertere Informationen bitte die Bedienungsanleitung beider Produkte beachten.