

Das Accu-Chek® Mobile Blutzuckermesssystem



Das neue Traumpaar.
Die Basis ist Kommunikation.
Darum spricht Accu-Chek
Mobile jetzt Bluetooth®.
Damit alles klar ist.

**WIRELESS
ADAPTER**



Verbinden und profitieren
Jetzt Accu-Chek Mobile mit der
mySugr App verbinden und die Pro
Version **KOSTENLOS** freischalten.

Einfaches Messen - in nur 4 Schritten



Öffnen Sie den Spitzenschutz.
Das Messgerät schaltet sich ein.



Stechen Sie Ihren Finger mit der
Stechhilfe, um Blut zu gewinnen.



Tragen Sie den Blutstropfen auf
das Testfeld auf.



Lesen Sie den Messwert ab und
schließen Sie den Spitzenschutz.



Bestellen Sie den Adapter **KOSTENLOS** im
Accu-Chek +Club Bestellcenter auf accu-chek.at



Accu-Chek Mobile WIRELESS ADAPTER anstecken



1. Abdeckung vom **USB-Stecker** entfernen. Möglicherweise müssen Sie etwas Kraft anwenden.



2. Stecken Sie jetzt einfach den Adapter in die USB-Schnittstelle des Blutzuckermessgerätes.




3. Aktivieren Sie **Bluetooth®** auf Ihrem Smartphone.



4. Drücken Sie den Knopf auf dem Adapter. Die grüne LED sollte schnell blinken.

Accu-Chek Mobile Blutzuckermessgerät mit der mySugr App verbinden

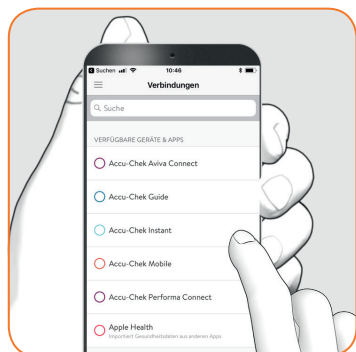

5. **Erstmaliges Verbinden:** Öffnen Sie die mySugr App. Gehen Sie ins **Menü** und klicken Sie auf „**Verbindungen**“.

Wählen Sie „Accu-Chek Mobile“.



6. Geben Sie nun die **letzten sechs Zahlen der Seriennummer** des Adapters ein. Diese sind auf der Innenseite des Adapters als auch auf der Verpackung abgebildet.



7. Der Datentransfer startet automatisch. Die grüne LED blinkt währenddessen langsam.

Sobald der Datentransfer beendet ist, hört die LED auf zu blinken und leuchtet konstant grün. Der Adapter schaltet sich automatisch ab.



8. **Bei der regulären Blutzuckermessung** Bluetooth® auf dem Smartphone aktiviert lassen. Knopf auf dem Adapter drücken, um den Datentransfer zu starten. Die grüne LED blinkt schnell. Nach dem Datentransfer stellt der Wireless Adapter automatisch ab.

Laden Sie die mySugr App kostenlos herunter:



ACCUCHEK, ACCUCHEK MOBILE und FASTCLIX sind Marken von Roche.
Alle weiteren Produktnamen und Marken gehören den entsprechenden Eigentümern.
© 2018 Roche Diabetes Care



www.accu-chek.at
Roche Diabetes Care Austria GmbH
1200 Wien, Handelskai 94-96
Diabetes-Hotline 01/277 27-355

ACCUCHEK®