

ACCU-FINE®

Roche

Jetzt in neuer  
Qualität!

## Accu-Fine® Insulinpen-Nadeln Sanfte Injektionen für alle



**NEU!**  
Länge 5 mm 31 G


ACCU-CHEK®

# Sanft, kompatibel und doppelter Schutz


## Accu-Fine: Die Vorteile auf einen Blick

Die qualitativ hochwertigen Insulinpen-Nadeln ermöglichen **sanfte Injektionen**, sind mit allen gängigen Insulinpens **kompatibel** und besitzen einen **doppelten Schutz**.

### Sicherheit zuerst: Doppelter Schutz

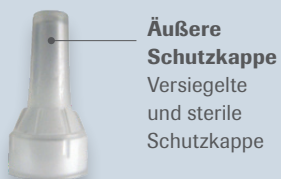

**Äußere Schutzkappe**  
Versiegelte und sterile Schutzkappe

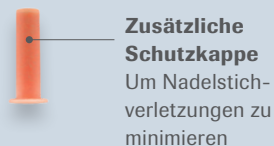

**Zusätzliche Schutzkappe**  
Um Nadelstichverletzungen zu minimieren




**Die Nadel**

### Was macht Accu-Fine Nadeln so sanft?

**Spezial-Schliff**  
für einen sanften Einstich in die Haut


**Spezial-Nadelwand**  
für einen erhöhten Insulinfluss

**Spezial-Beschichtung**  
für ein leichtes Gleiten in die Haut

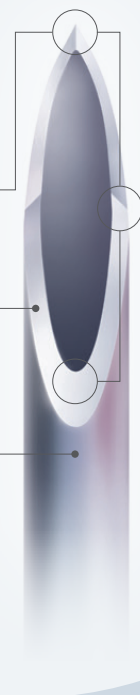

### Kompatibel mit allen gängigen Insulinpens

Sie müssen sich also nicht sorgen ob Accu-Fine Insulinpen-Nadeln auf Ihren Insulinpens passen.

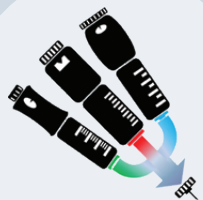

# Insulininjektion

## Empfehlungen für die korrekte Anwendung

### Die richtige Nadellänge und Injektionstechnik...


...sind essentiell für eine erfolgreiche Insulintherapie.<sup>1</sup>

Studien **empfehlen kürzere Nadeln**, da diese in der Regel ausreichen um das **Insulin in das Unterhautfettgewebe** zu transportieren. Das Risiko einer Injektion in den Muskel ist geringer, was schmerzhaft sein kann und die Wirkungszeit des Insulins verändern kann.<sup>1,2,3</sup>

Bitte **fragen Sie Ihren Arzt** welche **Nadellänge und Injektionstechnik** für Sie am besten geeignet ist.

Abbildung zeigt beispielhaft die Hautschichten eines Erwachsenen mit Normalgewicht.



In den meisten Fällen können Nadeln mit 5 mm Länge ohne Bildung einer Hautfalte senkrecht injiziert werden. Längere Nadeln können entweder im 45° Winkel und/oder in eine Hautfalte eingeführt werden.<sup>1,2</sup>

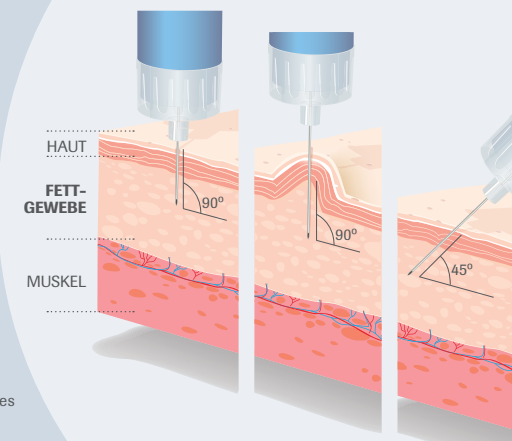

### Injektionsstellen...

...beeinflussen die Geschwindigkeit der Aufnahme des Insulins.<sup>4,5</sup>

- **Bauch:** schnellster Effekt
- **Oberarm:** langsamerer Effekt
- **Oberschenkel:** langsamerer Effekt
- **Gesäß:** langsamster Effekt

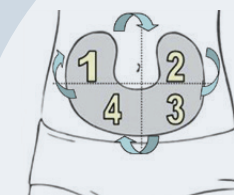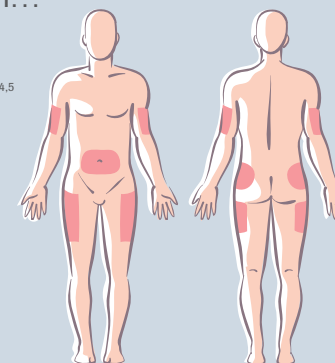

Wechseln Sie die Injektionsstellen regelmäßig, z. B. im Uhrzeigersinn um den Bauchnabel

Insulinpen-Nadeln sind sterile Medizinprodukte. Schon nach einmaligem Gebrauch sind Insulinpen-Nadeln nicht mehr steril.

**Darum muss jedes Mal eine neue Nadel verwendet werden.<sup>1</sup>**



# Accu-Fine Insulinpen-Nadeln

## Sanfte Injektionen für alle

Accu-Fine Nadeln sind für alle!

- Accu-Fine bietet **verschiedene Varianten** um **unterschiedliche Patientenbedürfnisse** abzudecken.
- Das Gewinde der Nadeln **passt auf alle gängigen Insulinpens**.
- Der **spezielle Schliff** und die **Beschichtung**, sowie die **dünne Nadelwand** ermöglichen eine besonders sanfte Injektion.

### JETZT TESTEN!

Verlangen Sie bei der nächsten Bestellung von Insulinpen-Nadeln Accu-Fine um diese zu erhalten und überzeugen Sie sich von der Qualität.



- 1 Frid AH et al. Mayo Clinic Proceedings 2016; 91, 1231-1255.
- 2 Gibney MA, et al. Current Medical Research and Opinion 2010; 26, 1519-1530.
- 3 Thow JC, et al. Diabet Med 1990; 7:600-602.
- 4 Süssstrunk et al. Diabetologia 1982; 22:171-4.
- 5 Koivisto VA et al. Ann Intern Med. 1980; 92:59-61.

 Find us on  
**facebook®**  
[www.facebook.com/accucheckat](http://www.facebook.com/accucheckat)

ACCU-CHEK und ACCU-FINE sind Marken von Roche. © 2018 Roche Diabetes Care.

**www.accu-check.at**  
Roche Diabetes Care Austria GmbH  
1200 Wien, Handelskai 94-96  
**Diabetes-Hotline: 01/277 27-355**



**ACCU-CHEK®**