



3 Schritte zur Blutentnahme

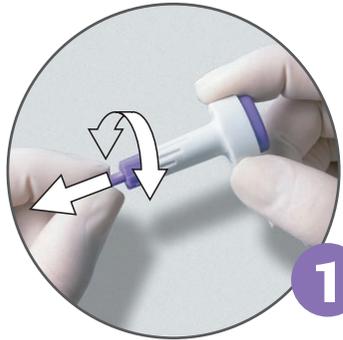


Schutzkappe drehen und abziehen

1

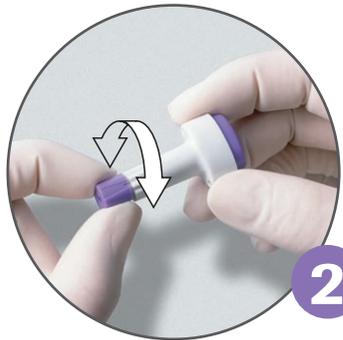

Punktionstiefe einstellen

2

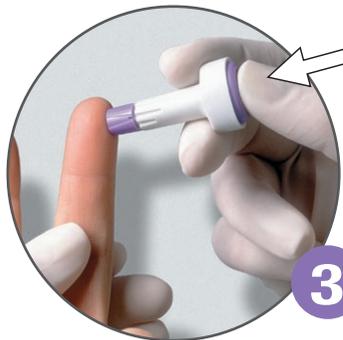

Stechhilfe ansetzen und mit Daumen Punktion auslösen

3

ACCU-CHEK® Safe-T-Pro Plus

Professionelle Einmal-Stechhilfen mit Safe-T-Technologie

Accu-Chek Safe-T-Pro Plus Einmal-Stechhilfen stehen in der praktischen 200 Stück Spenderbox inkl. Standardöffnung an der Vorderseite zur Verfügung.



Wenn Sie Fragen zu **Accu-Chek Safe-T-Pro Plus Einmal-Stechhilfen** haben, steht Ihnen Ihr Accu-Chek Betreuer oder das Accu-Chek Kunden Service Center unter **01/277 27-355** Mo – Fr von 8:00 bis 18:00 Uhr gerne zur Verfügung.



ACCU-CHEK und SAFE-T-PRO sind Marken von Roche. © 2017 Roche Diabetes Care

www.accu-chek.at

Roche Diabetes Care Austria GmbH
1200 Wien, Handelskai 94-96

Diabetes Hotline: 01/277 27-355



ACCU-CHEK®

ACCU-CHEK® Safe-T-Pro Plus

Roche

Hygienisch, einfach und vielseitig.

Die vielseitige Einmal-Stechhilfe für den professionellen Gebrauch



ACCU-CHEK®

07662831001 - 4/17

Hygienisch & einfach mit Safe-T-Technologie

Für die professionelle Blutgewinnung in Klinik und Praxis sind vor allem zwei Aspekte entscheidend:

- **Hygiene und**
- **einfache Handhabung**

Die Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus Einmal-Stechhilfen erfüllen einerseits die hohen Anforderungen im Bereich der Hygiene und ermöglichen andererseits eine einfache, intuitive Handhabung in wenigen Schritten.

- Schutzkappe für eine sterile Lanzette
- Aktivierung mittels Druckknopf verhindert versehentliches Auslösen
- Keine Verletzungsgefahr nach Gebrauch
- Wiederverwendung der Lanzette nicht möglich
- Spezieller 3-seitiger Lanzetten-Schliff für sanfte Blutgewinnung



Die vielseitige Einmal-Stechhilfe mit 3 Punktionstiefen

Accu-Chek Safe-T-Pro Plus ist mit den 3 wählbaren Punktionstiefen für unterschiedlichste Patientengruppen geeignet [auch im Neonatologie Bereich].




Geringe Punktionstiefe: 1.3 mm
Mittlere Punktionstiefe: 1.8 mm
Hohe Punktionstiefe: 2.3 mm

Empfohlene Punktionsstufen-Einstellung:

- Stufe 1 für zarte Haut
- Stufe 2 für normale Haut
- Stufe 3 für dickere Haut

Einfache Bedienung durch ergonomische T-Form

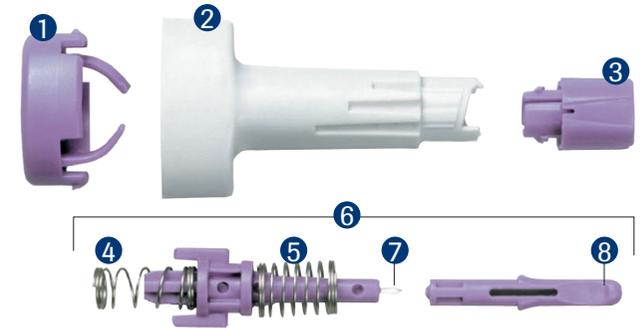

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1 Auslöseknopf | 5 Rückziehfeder |
| 2 T-Form Gehäuse | 6 Lanzette |
| 3 Punktionstiefeneinstellung | 7 Nadel |
| 4 Antriebsfeder | 8 Schutzkappe |

Vorbereitung:

Hände nach Bedarf erwärmen. Reinigen Sie die Punktionsstelle entsprechend Ihrer Vorschriften. Zur Kapillarblutentnahme sind die Seiten der Fingerkuppe am besten geeignet.

Nachbehandlung:

Die Fingerkuppe mit einem sauberen Tuch reinigen und nach Bedarf ein Wundpflaster auflegen.