



### 3 Schritte zur Blutentnahme

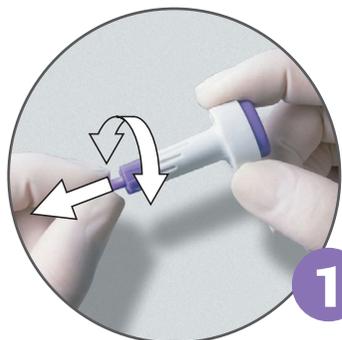


Schutzkappe drehen und abziehen

1

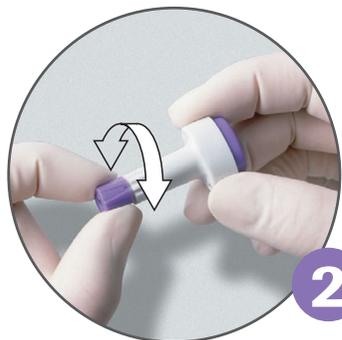

Punktionstiefe einstellen

2

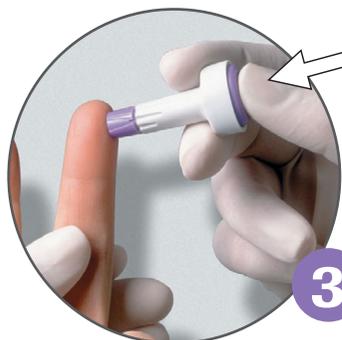

Stechhilfe ansetzen und mit Daumen Punktion auslösen

3

ACCU-CHEK® Safe-T-Pro Plus

## Professionelle Einmal-Stechhilfen mit Safe-T-Technologie

Accu-Chek Safe-T-Pro Plus Einmal-Stechhilfen stehen in der praktischen 200 Stück Spenderbox inkl. Standardöffnung an der Oberseite zur Verfügung.



Wenn Sie Fragen zu **Accu-Chek Safe-T-Pro Plus Einmal-Stechhilfen** haben, steht Ihnen Ihr Accu-Chek Betreuer oder das Accu-Chek Kunden Service Center unter **01/27787-355** Mo - Fr von 8:00 bis 18:00 Uhr gerne zur Verfügung.



ACCU-CHEK und SAFE-T-PRO sind Marken von Roche. © 2009 Roche Diagnostics

[www.accu-chek.at](http://www.accu-chek.at)  
Roche Diagnostics GmbH  
A-1211 Wien, Engelhorngasse 3  
Diabetes Hotline: 01/277 87-355



ACCU-CHEK®

ACCU-CHEK® Safe-T-Pro Plus



## Hygienisch, einfach und vielseitig.

Die vielseitige Einmal-Stechhilfe für den professionellen Gebrauch



geführt durch  
**Safe-T**  
Technologie

ACCU-CHEK®

00056002183 - 9/09

## Hygienisch & einfach mit Safe-T-Technologie

Für die professionelle Blutgewinnung in Klinik und Praxis sind vor allem zwei Aspekte entscheidend:

- **Hygiene und**
- **einfache Handhabung**

Die neuen Accu-Chek Safe-T-Pro Plus Einmal-Stechhilfen erfüllen einerseits die hohen Anforderungen im Bereich der Hygiene und ermöglichen andererseits eine einfache, intuitive Handhabung in wenigen Schritten.

- Schutzkappe für eine sterile Lanzette
- Aktivierung mittels Druckknopf verhindert versehentliches Auslösen
- Keine Verletzungsgefahr nach Gebrauch
- Wiederverwendung der Lanzette nicht möglich
- Spezieller 3-seitiger Lanzetten-Schliff für sanfte Blutgewinnung



## Die vielseitige Einmal-Stechhilfe mit 3 Punktionstiefen

Accu-Chek Safe-T-Pro Plus ist mit den 3 wählbaren Punktionstiefen für unterschiedlichste Patientengruppen geeignet [auch im Neonatologie Bereich].




**Geringe Punktionstiefe:** 1.3 mm  
**Mittlere Punktionstiefe:** 1.8 mm  
**Hohe Punktionstiefe:** 2.3 mm

### Empfohlene Punktionsstufen-Einstellung:

- Stufe 1 für zarte Haut
- Stufe 2 für normale Haut
- Stufe 3 für dickere Haut

## Einfache Bedienung durch ergonomische T-Form

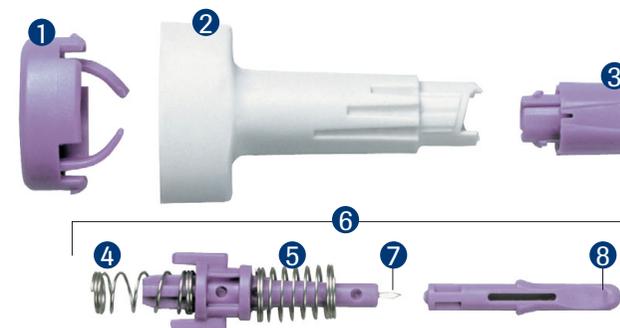

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1 Auslöseknopf               | 5 Rückziehfeder |
| 2 T-Form Gehäuse             | 6 Lanzette      |
| 3 Punktionstiefeneinstellung | 7 Nadel         |
| 4 Antriebsfeder              | 8 Schutzkappe   |

### Vorbereitung:

Hände nach Bedarf erwärmen. Reinigen Sie die Punktionsstelle entsprechend Ihrer Vorschriften. Zur Kapillarblutentnahme sind die Seiten der Fingerkuppe am besten geeignet.

### Nachbehandlung:

Die Fingerkuppe mit einem sauberen Tuch reinigen und nach Bedarf ein Wundpflaster auflegen.