

Hiermit beginnen

Kurzanleitung



WARNUNG


- Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung des Accu-Chek Performa Connect Blutzuckermessgeräts. Die Gebrauchsanweisung enthält wichtige Hinweise zur Handhabung sowie zusätzliche Informationen.
- Die Stechhilfe ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.

Übersicht



- 1 Zurück-Taste
- 2 Auf- und Ab-Taste
- 3 Display
- 4 Ein/Aus/Set/OK-Taste
- 5 Steckplatz für Teststreifen
- 6 Batterieschubfach
- 7 Micro-USB-Anschluss


Vorbereiten der Stechhilfe

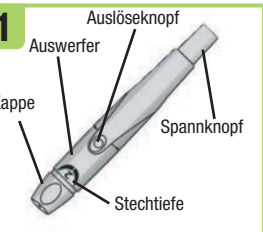


Machen Sie sich mit der Accu-Chek Softclix Stechhilfe vertraut.




Nehmen Sie eine Lanzette aus ihrem Fach im Etui.

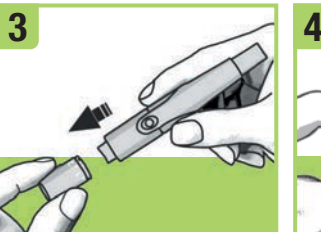


Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe gerade ab. Drehen Sie die Kappe nicht.

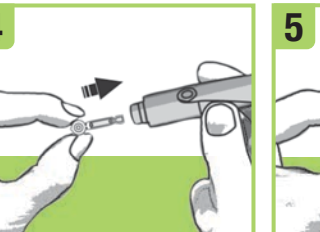

Stecken Sie die Lanzette in die Stechhilfe bis die Lanzette mit einem Klick einrastet.

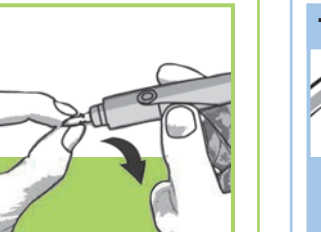


Drehen Sie die Schutzkappe der Lanzette ab.

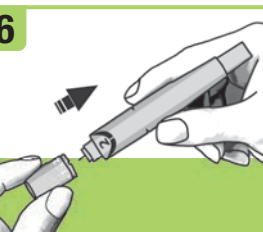

Setzen Sie die Kappe wieder auf die Stechhilfe. Achten Sie darauf, dass die Positionierungskerbe in der Kappe auf einer Linie mit der Positionierungslinie auf der Stechhilfe liegt.



Stellen Sie an der Stechhilfe eine für Sie passende Stechtiefe ein. Beginnen Sie mit Stufe 2. Je nach Gewebedicke kann ein höherer Wert erforderlich sein.

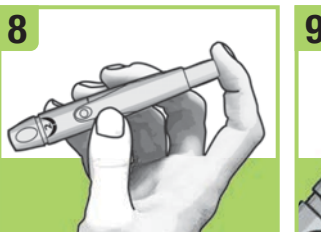


Drücken Sie den Spannkopf bis zum Anschlag, ähnlich wie bei einem Kugelschreiber. Drücken Sie nicht den Auslöseknopf, solange Sie noch den Spannkopf drücken. Die Stechhilfe kann verwendet werden, wenn in dem Auslöseknopf ein gelbes Feld erscheint.




Verwenden Sie die Stechhilfe erst unmittelbar vor der Blutentnahme.


Durchführen einer Blutzuckermessung

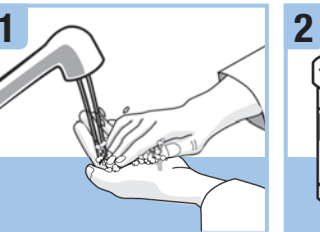


Waschen Sie vor der Blutzuckermessung Ihre Hände und trocknen Sie sie ab.

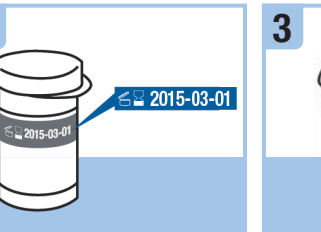

Überprüfen Sie das Haltbarkeitsdatum auf der Teststreifendose. Verwenden Sie keine Teststreifen, deren Haltbarkeitsdatum überschritten ist.

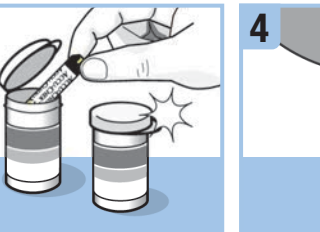

Entnehmen Sie einen Teststreifen aus der Teststreifendose. Verschließen Sie den Deckel wieder fest.

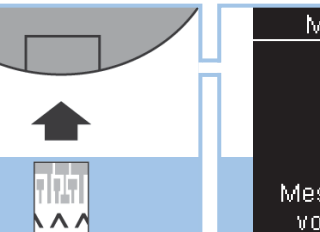


Führen Sie den Teststreifen in Pfeilrichtung in das Messgerät ein.




Das Messgerät schaltet sich ein. **Messung wird vorbereitet** erscheint auf dem Display.



Drücken Sie die Stechhilfe fest gegen die Seite Ihrer Fingerbeere und drücken Sie den gelben Auslöseknopf, bis der Einstich erfolgt.

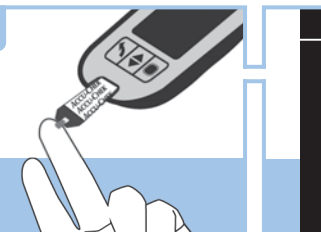

Berühren Sie mit dem Ende des Teststreifens den Blutropfen. Tragen Sie das Blut nicht auf die Oberseite des Teststreifens auf.

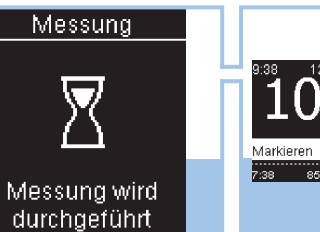

Sobald eine ausreichende Menge Blut in den Teststreifen eingesogen wurde, erscheint **Messung wird durchgeführt** auf dem Display.



Auf dem Display erscheint nach 5 Sekunden der Messwert.



Ziehen Sie die Gerätekappe von der Stechhilfe ab. Halten Sie die Stechhilfe so, dass das untere Ende der Stechhilfe von Ihnen weg zeigt. Schieben Sie den Auswerfer nach vorne, um die Lanzette auszuwerfen.

LETZTE ÜBERARBEITUNG: 2014-08

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

ACCUCHEK, PERFORMA CONNECT und SOFTCLIX sind
Marken von Roche.
© 2015 Roche Diabetes Care
07655932001(01)-0515

