

VERBINDUNG HERSTELLEN



Herunterladen der App



AUF IHREM MOBILEN GERÄT*

- 1 Öffnen Sie den App Store.
- 2 Suchen Sie nach der ACCU-CHEK Connect Diabetes Management App.
- 3 Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.

*Eine Liste aller kompatiblen mobilen Geräte erhalten Sie unter www.accu-chek.at/dmapp



! WARNUNG
Verwenden Sie die App niemals gemeinsam mit einer anderen Person.

Einrichten eines Webkontos



AUF IHREM MOBILEN GERÄT


Die folgende Anleitung bezieht sich auf das Einrichten eines Webkontos über die App; Sie können den Vorgang jedoch unter www.accu-chekconnect.com auch über den Browser Ihres PCs durchführen.

- 1 Wählen Sie in der App **Einstellungen > Webkonto**.
- 2 Wählen Sie die Option **Klicken Sie HIER, um ein Webkonto zu erstellen**.
- 3 Geben Sie alle für das Konto relevanten Informationen ein.
-Der Benutzername muss aus 5–30 Zeichen (nur Buchstaben oder Ziffern) bestehen.
-Das Kennwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen und sowohl Buchstaben als auch Ziffern enthalten.
- 4 Wählen Sie **Nein**, um vorhandene Daten zu übertragen, es sei denn, Sie sind an einem PC und nutzen bereits die ACCU-CHEK 360° Diabetes Management Software.
- 5 Vervollständigen Sie Ihre Diabetesdaten.

- 6 Schließen Sie den Browser, indem Sie auf die **Home**-Taste Ihres mobilen Geräts drücken.
- 7 Öffnen Sie die App erneut.
- 8 Geben Sie den **Benutzernamen** und das **Kennwort** ein, die Sie gerade für Ihr Webkonto erstellt haben und wählen Sie **Anmelden**.
- 9 Gehen Sie zurück, um zu den **Einstellungen** zurückzukehren.

Ihre App und Ihr Webkonto sind jetzt für die Datenübertragung miteinander verbunden.

Herstellen einer Verbindung zwischen Blutzuckermessgerät und mobilem Gerät

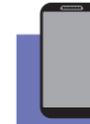


AUF IHREM MOBILEN GERÄT

- 1 Wählen Sie in der App **Einstellungen/Grundfunktionen > Messgerät verbinden**.
- 2 Falls Sie dazu aufgefordert werden, stellen Sie sicher, dass die drahtlose **Bluetooth**-Technologie aktiviert ist.
- 3 Wählen Sie **Weiter**, um die Funktionen **Auto-Senden** und **Zeit synchronisieren** zu aktivieren.



AUF IHREM MESSGERÄT

- 4 Schalten Sie das Messgerät ein und verwenden Sie **↔** oder **↵** zur Navigation und **OK** zum Auswählen der gewünschten Option.
- 5 Wählen Sie **Einstellungen > Kabellos > Ja**.

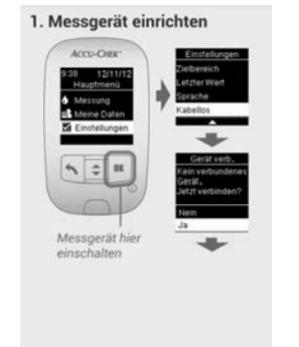

HINWEIS: Der angezeigte Code ist 90 Sekunden lang gültig.



AUF IHREM MOBILEN GERÄT

- 6 Wenn der Code auf dem Display des Messgeräts angezeigt wird, wählen Sie in der App **Weiter**.
- 7 Wählen Sie **Accu-Chek** aus. (Warten Sie, bis sich ein Pop-up-Menü öffnet.)
- 8 Geben Sie den Code, der auf dem Display des Messgeräts angezeigt wird, in die App ein.
- 9 Schließen Sie die Tastatur und wählen Sie **OK**, um den Code zu bestätigen.
- 10 Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt wurde.
- 11 Wählen Sie **Schließen** oder **Messgerät registrieren**, nachdem **Verbindung erfolgreich** auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 12 Wählen Sie **Zurück**, um zur Startseite zurückzukehren.

HINWEIS: Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, können Sie Ihr Messgerät direkt über die App registrieren.

Senden eines Blutzuckermesswerts an Ihr mobiles Gerät



AUF IHREM MESSGERÄT

Schalten Sie nach dem Herstellen einer Verbindung Ihr Messgerät zunächst aus, bevor Sie eine Blutzuckermessung durchführen. Nachdem Sie eine Blutzuckermessung erfolgreich durchgeführt haben, gehen Sie folgendermaßen vor, um den Blutzuckermesswert an Ihr mobiles Gerät zu senden.



- 1 Drücken Sie auf **OK**, um den Messwert zu markieren.



- 2 Wählen Sie mit **↔** oder **↵** die gewünschte Markierung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Drücken Sie auf **OK**, um den Messwert zu senden.



AUF IHREM MOBILEN GERÄT

- 3 Ihr Blutzuckermesswert erscheint auf der Startseite Ihrer App.

Die Wortmarke **Bluetooth**[®] und die dazugehörigen Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden durch Roche unter Lizenz verwendet.

Alle anderen Produktnamen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT und ACCU-CHEK 360° sind Marken von Roche.

LETZTE ÜBERARBEITUNG: 2015-02

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

© 2015 Roche Diabetes Care
07658087001(01)-0515

