

Guida rapida Accu-Chek® Active

Se utilizzate per la prima volta lo strumento, leggete attentamente le istruzioni dettagliate riportate nel manuale per l'uso.



- ① Display a cristalli liquidi
- ② Pulsante M (Memory)
- ③ Pulsante S (Set)
- ④ Fessura per inserimento striscia
- ⑤ Finestrella di misurazione
- ⑥ Slitta portastriscia
- ⑦ Vano batteria (retro)
- ⑧ Fessura per chip codificatore

Inserimento della batteria

Aprire il coperchio del vano batteria ⑦ (vedi figura sopra) e togliere la pellicola di protezione della batteria al litio. Verificare che il polo positivo contrassegnato dal «+» sia sempre rivolto verso il basso. Inserire nuovamente il vano batteria nello

strumento e premere leggermente sulla parte superiore per rimetterlo in sede.

Una batteria nuova permette di effettuare circa 1000 misurazioni.

Codifica



Per effettuare la codifica lasciare spento Accu-Chek Active.

Estrarre il chip codificatore di

colore arancione dalla confezione delle strisce reattive e inserirlo nell'apposita fessura dello strumento ⑧ (vedi figura sopra). Verificare che il chip sia perfettamente inserito. Accendere lo strumento inserendo una striscia reattiva.

Confrontare il codice a tre cifre (p.es. **133**) che appare sul display con il codice stampato sul flacone delle strisce reattive. I due codici devono essere identici.



Esecuzione della misurazione




Accensione dello strumento.

Inserendo una striscia reattiva, lo strumento si

accende automaticamente nella modalità «Misurazione». Tenere la striscia reattiva con la zona di applicazione e le frecce stampate rivolte verso l'alto. Inserire la striscia orizzontalmente nella direzione indicata dalle frecce nell'apposita fessura ④ dello strumento fino allo scatto (vedi figura sopra).

Reinserire quindi la striscia nello strumento entro 20 secondi.

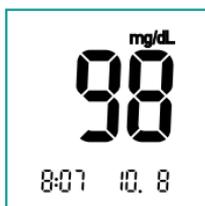

Visualizzazione del risultato.

Se si applica il campione di sangue sulla striscia

all'interno dello strumento, la misurazione si conclude dopo circa 5 secondi. Il risultato appare sul display e viene memorizzato automaticamente con relativa data e ora.



Applicazione del sangue all'interno dello strumento.

Quando sul display

lampeggia il simbolo della goccia, applicare una goccia di sangue (sono sufficienti 1-2 µL) al centro della zona di applicazione quadrata di colore arancione. Durante l'applicazione è possibile toccare la zona con il dito.



Conferma visiva.

Verificare il risultato della misurazione confrontando il colore della

finestrella rotonda posta sul retro della striscia con la scala cromatica stampata sull'etichetta del flacone delle strisce. Tale controllo deve essere effettuato entro 30-60 secondi dall'applicazione del campione di sangue.

Applicazione del sangue all'esterno dello strumento.

Quando sul display lampeggia il simbolo della goccia, togliere la striscia dallo strumento. Applicare la goccia di sangue sulla striscia.

Memoria



Accu-Chek Active memorizza automaticamente 200 valori di misurazione con relativa

data e ora. Premere il pulsante M per accendere lo strumento e richiamare i valori memorizzati. Sul display appare in alto a sinistra la scritta «mem» e l'ultimo valore memorizzato. Premendo il pulsante S viene visualizzato il valore precedente e così via.

Pulizia dello strumento



Estrarre orizzontalmente verso di sé la slitta portastriscia e lavarla con acqua fredda.

Se necessario, disinfettarla con alcool etilico al 70%. Pulire il sistema ottico con un panno morbido che non lasci filamenti o un bastoncino di cotone leggermente inumidito. Lasciare asciugare bene tutti i componenti prima di reinserire la slitta portastriscia nello strumento.

ACCU-CHEK® Active

Lista dei principali messaggi d'errore

La striscia reattiva non è stata inserita correttamente.

Inserire la striscia nella direzione indicata dalle frecce con la zona di applicazione rivolta verso l'alto.

Nello strumento è stato inserito il chip codificatore sbagliato. Il chip

non appartiene alle strisce reattive dei sistemi per la glicemia Glucotrend o Accu-Chek Active. Togliere il chip codificatore sbagliato ed inserire quello giusto.

Errore di lettura del chip codificatore.

Togliere il chip e reinserirlo nell'apposita fessura. Se il messaggio d'errore appare nuovamente non utilizzare il chip e la relativa confezione di strisce.

Errore del sistema ottico. Pulire

il sistema ottico (Manuale per l'uso, cap. 7.1). Verificare che la striscia reattiva sia presente sulla slitta portastriscia. Se il messaggio d'errore permane, lo strumento è difettoso. Contattare il Servizio Assistenza.

In casi rari: è stata applicata una quantità insufficiente di sangue. Ripetere la misurazione con una nuova striscia reattiva Accu-Chek Active.

Il sistema ottico è sporco oppure è stata inserita una striscia già usata

o scaduta. Pulire il sistema ottico (Manuale per l'uso, cap. 7.1) e ripetere la misurazione con una nuova striscia Accu-Chek Active.

Lo strumento risente di forti interferenze elettromagnetiche.

Cambiare posizione.

Il chip codificatore è stato rimosso durante la misurazione o

non è stato inserito correttamente nello strumento oppure è difettoso. Togliere il chip e reinserirlo nell'apposita fessura.

La striscia reattiva non è stata inserita correttamente o è stata

spostata durante la misurazione oppure il sangue è stato applicato troppo presto. Ripetere la misurazione con una nuova striscia e assicurarsi che sia inserita correttamente.

Il chip codificatore non è stato inserito oppure è difettoso.

È stata applicata una quantità insufficiente di sangue oppure

la striscia non è stata inserita correttamente sulla slitta portastriscia. Ripetere la misurazione con una nuova striscia reattiva Accu-Chek Active.

Accu-Chek Active è difettoso e non può essere utilizzato.

Contattare il Servizio Assistenza.

La temperatura ambientale o quella dello strumento è

al di fuori dei limiti consentiti.

Cambiare posizione allo strumento e lasciare che torni lentamente alla temperatura ambiente fino alla scomparsa del simbolo di avvertenza.

Il valore glicemico misurato è superiore a 600 mg/dL (33,3 mmol/L).

Il valore glicemico misurato è inferiore a 10 mg/dL (0,6 mmol/L).

Questo messaggio appare ...

- nella modalità «Misurazione»
- durante la visualizzazione del risultato

- in tutti gli schermi

- nella modalità «Misurazione»

e significa:

la temperatura è/era al momento della misurazione fuori dai limiti consentiti. Non utilizzare il risultato a fini terapeutici!

quando il simbolo appare per la prima volta, è possibile eseguire ancora circa 50 misurazioni. Sostituire al più presto la batteria.

la luce ambientale è troppo forte. Non è possibile eseguire la misurazione. Cambiare posizione.

Roche Diagnostics SpA
Viale G.B. Stucchi 110
I-20052 Monza (MI)
Numero Verde 800-822189
www.accu-chek.it

ACCU-CHEK is a trademark of
a Member of the Roche Group