

ACCU-CHEK® Compact Plus

检测您的血糖

Accu-Chek Compact Plus 血糖仪预装了电池并预先设定了日期和时间。插入试纸筒后，Accu-Chek Compact Plus 血糖仪将自动开始编码。

插入或更换试纸筒



1 打开试纸筒盒盖。



2 按下红色的试纸筒释放按钮。



3 前倾血糖仪，试纸筒将自行脱落。



4 插入新试纸筒。

检测血糖



1 拉下中央的检测按钮以装入试纸。



2 握住血糖仪，确保试纸指向下方。使血滴接触试纸的前端边缘（即黑色凹口所在处）。试纸将吸入血液。



3 查看显示的血糖仪读数。



4 拉下检测按钮以弹出用过的试纸。

ACCU-CHEK® Softclix Plus

借助 Accu-Chek Compact Plus 血糖仪背面的滑动按钮，可以将 Accu-Chek Softclix Plus 采血笔从血糖仪上卸下。只需将该型号采血笔加装到血糖仪上，即可开始使用。



1 取下采血笔的底盖。



5 将采血笔底盖重新按压到采血笔上。当底盖卡入适当位置时，会发出咔嗒声。



2 按下采血笔顶部的活塞以弹出用过的采血针。



6 将底盖拧转至所需的深度（共有 11 种深度可供设定）。



3 将新采血针滑入采血针架，并推入采血针直至听到咔嗒声（表明已安装到适当位置）。



7 向下按压活塞至最底部。活塞会往回移动大约总距离的 1/3。此时，采血笔即已准备就绪。



4 拧下采血针的保护帽。



8 使采血笔接触选定的检测部位，再次向下按压采血笔顶部的活塞直至听到咔嗒声，以获取血样。

Accu-Chek Softclix Plus 采血笔采用了专门的设计，患者独自一人即可用它来进行自我检测。该采血笔不能在多患者情况下用于收集血样，因为它不具备防止交叉感染的功能。

上述操作示意图不能取代 Accu-Chek Compact Plus 血糖检测系统的综合性使用说明。请务必阅读使用说明书中的安全说明。

ACCU-CHEK, SOFTCLIX and LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT. are trademarks of Roche.
© 2007 Roche Diagnostics

www.accu-check.com
Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim



ACCU-CHEK®

Live life. The way you want.