

ACCU-CHEK® Compact Plus

Mesure de la glycémie

Le lecteur Accu-Chek Compact Plus est fourni avec des piles déjà en place, et l'heure et la date sont préréglées.

La calibration s'effectue automatiquement lors de l'insertion de la cartouche de bandelettes réactives.

Mise en place ou remplacement d'une cartouche de bandelettes réactives



1 Soulevez le couvercle du compartiment de la cartouche.



2 Appuyez sur le bouton rouge qui libère la cartouche.



3 Tenez le lecteur à la verticale et penchez-le vers l'avant: la cartouche tombe.



4 Insérez une nouvelle cartouche de bandelettes réactives.


Mesure de la glycémie



1 Appuyez sur la touche Test centrale pour libérer une bandelette réactive.



2 Tenez le lecteur de manière à ce que la bandelette soit dirigée vers le bas. Mettez la goutte de sang en contact avec le bord inférieur de la bandelette au niveau de l'encoche noire. La bandelette absorbe alors le sang.

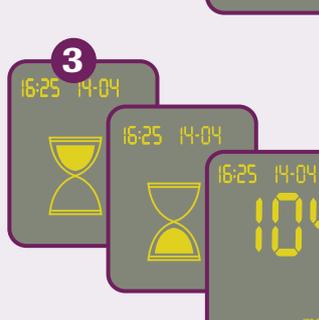

Le résultat apparaît à l'écran.



4 Appuyez sur la touche Test centrale pour éjecter la bandelette usagée.

ACCU-CHEK® *Softclix Plus*

Il est possible de dissocier l'autopiqueur Accu-Chek Softclix Plus du lecteur Accu-Chek Compact Plus à l'aide du bouton coulissant situé à l'arrière du lecteur, tout comme il est possible de l'utiliser fixé sur le lecteur.



1 Retirez l'embout de l'autopiqueur.



2 Appuyez sur le bouton-poussoir à l'extrémité de l'autopiqueur pour éjecter la lancette usagée.



3 Introduisez une nouvelle lancette dans le porte-lancette jusqu'au déclic.



4 Retirez le capuchon protecteur de la lancette en le tournant.



5 Replacez l'embout sur l'autopiqueur. Un déclic confirme l'enclenchement de l'embout.



6 Faites tourner l'embout pour régler la profondeur de piqûre (11 positions possibles).



7 Appuyez sur le bouton-poussoir jusqu'à la butée. Le bouton-poussoir revient en arrière sur un tiers de sa longueur initiale. L'autopiqueur est armé.



8 Placez l'autopiqueur contre le site de prélèvement choisi et appuyez de nouveau sur le bouton-poussoir jusqu'à ce que vous entendiez un déclic pour obtenir une goutte de sang.

L'autopiqueur Accu-Chek Softclix Plus est destiné à l'autocontrôle du patient. Comme il n'est pas conçu pour éviter les risques d'infections croisées, il ne doit pas servir au prélèvement de sang de plusieurs personnes.

Ce guide de manipulation ne saurait remplacer le mode d'emploi détaillé du lecteur de glycémie Accu-Chek Compact Plus. Conformez-vous impérativement aux consignes de sécurité figurant dans le mode d'emploi.

ACCU-CHEK, SOFTCLIX and LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT. are trademarks of Roche.
© 2007 Roche Diagnostics

www.accu-chek.com
Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim



ACCU-CHEK®

Live life. The way you want.