

ACCU-CHEK® Compact Plus

Meten van uw bloedglucose

De Accu-Chek Compact Plus-meter wordt geleverd met reeds geplaatste batterijen en de datum en de tijd zijn ook al ingesteld.

De Accu-Chek Compact Plus-meter wordt automatisch gecodeerd na het plaatsen van de teststrokcassette.

Teststrokcassette plaatsen of vervangen



1 Open de deksel van het cassette-compartiment.



2 Druk op de rode knop voor het ontgrendelen van de cassette.



3 Kantel de meter naar voren, waardoor de teststrokcassette uit de meter valt.



4 Plaats een nieuwe teststrokcassette.


Uitvoeren van een bloedglucosemeting



1 Trek de middelste toets (Test-toets) naar beneden om een teststrook naar buiten te transporteren.



2 Houd de meter zodanig vast, dat de teststrook naar beneden wijst. Houd de bloeddruppel tegen de voorkant van de teststrook, bij de zwarte inkeping. De teststrook zuigt het bloed op.

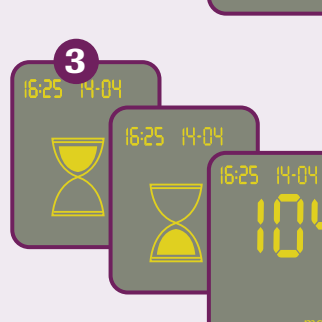

3 Kijk op de display om het meetresultaat af te lezen.



4 Trek de middelste toets (Test-toets) naar beneden om de gebruikte teststrook uit te werpen.

ACCU-CHEK® *Softclix Plus*

De Accu-Chek Softclix Plus-prikpen kan van de Accu-Chek Compact Plus-meter worden afgenomen m.b.v. de ontgrendelingsknop aan de onderkant van de meter of worden gebruikt, terwijl deze aan de meter is bevestigd.



1 Trek het dopje van de prikpen.



2 Druk de bedieningsknop aan de bovenkant van de prikpen in om het gebruikte lancet uit te werpen.



3 Schuif een nieuw lancet in de lancethouder en duw zolang tot deze met een hoorbare KLIK wordt bevestigd.



4 Draai het beschermingskapje van het lancet af.



5 Plaats het dopje weer op de prikpen. Het dopje moet met een duidelijk hoorbare KLIK worden bevestigd.



6 Draai het dopje op de door u gewenste prikdiepte (er zijn in totaal 11 standen mogelijk).



7 Druk de bedieningsknop geheel in. De bedieningsknop komt voor één derde weer naar buiten. De prikpen is nu gespannen.



8 Druk voor het verkrijgen van een bloedmonster de prikpen op de gekozen prikplaats en druk de bedieningsknop aan de bovenkant van de prikpen opnieuw in tot u een KLIK hoort.

De Accu-Chek Softclix Plus-prikpen is bedoeld voor gebruik bij zelfcontrole door één persoon. De prikpen mag niet worden gebruikt voor het afnemen van bloed bij verschillende personen, omdat hiervoor geen speciale voorzieningen ter voorkoming van infectiegevaar getroffen zijn.

Dit blad met beknopte instructies is geen vervanging van de gebruiksaanwijzing van uw Accu-Chek Compact Plus-bloedglucosemeter. Lees de veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

ACCU-CHEK, SOFTCLIX and LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT. are trademarks of Roche.
© 2007 Roche Diagnostics

www.accu-check.com
Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim



ACCU-CHEK®

Live life. The way you want.