

ACCU-CHEK® Compact Plus

Контроль глюкозы крови

Глюкометр Акку-Чек Компакт Плюс поставляется с установленными батареями и предварительной настройкой даты и времени.

Кодировка глюкометра Акку-Чек Компакт Плюс происходит автоматически при установке кассеты с тест-полосками.

Установка или замена кассеты с тест-полосками



1 Откройте крышку отсека для кассеты.



2 Нажмите красную кнопку фиксатора кассеты.



3 Наклоните глюкометр так, чтобы кассета выпала из отсека.



4 Вставьте новую кассету с тест-полосками.


Контроль глюкозы крови



1 Сдвиньте вниз кнопку запуска измерения в центре глюкометра, чтобы выпустить новую тест-полоску из кассеты.



2 Держите глюкометр так, чтобы тест-полоска была направлена вниз. Прикоснитесь каплей крови к помеченной черным цветом канавке на торцевой грани тест-полоски. Тест-полоска впитает кровь.

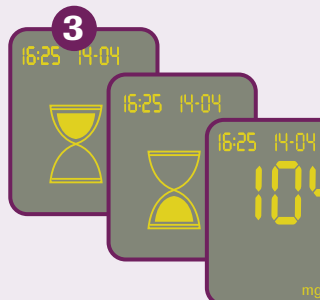

3 Прочитайте результат измерения на дисплее.



4 Сдвиньте вниз кнопку запуска измерения в центре глюкометра для выброса использованной тест-полоски.

ACCU-CHEK® *Softclix Plus*

Ланцетное устройство Акку-Чек Софткликс Плюс можно отсоединить от глюкометра Акку-Чек Компакт Плюс скользящей кнопкой на задней стороне глюкометра или же можно пользоваться ланцетным устройством, не отделяя его от глюкометра.



1 Снимите с ланцетного устройства колпачок-наконечник.



2 Нажмите на поршень толкателя у верхнего конца ланцетного устройства для выброса использованного ланцета.



3 Вставьте новый ланцет в держатель до щелчка, чтобы ланцет зафиксировался.



4 Снимите защитный колпачок с ланцета, повернув защитный колпачок в сторону.



5 Снова присоедините к ланцетному устройству колпачок-наконечник. Колпачок фиксируется со щелчком.



6 Поворотом колпачка-наконечника установите требуемую глубину прокола (всего 11 отметок).



7 Нажмите на поршень толкателя и родвиньте его вниз до упора. Отпущенный поршень вернется примерно на одну треть этого перемещения назад. Теперь ланцетное устройство откалибровано.



8 Приложите ланцетное устройство к месту взятия образца крови и нажмите на поршень толкателя еще раз до щелчка.

Ланцетное устройство Акку-Чек Софткликс Плюс предназначено для индивидуального самоконтроля уровня глюкозы в крови одним пациентом. Данное ланцетное устройство не обеспечивает защиту от перекрестной инфекции, соответственно, использовать его для забора крови у нескольких пациентов не допускается.

Данная инструкция не является заменой Руководству Пользователя прибором Акку-Чек Компакт Плюс. Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями по технике безопасности, приведенными в Руководстве Пользователя.

ACCU-CHEK, SOFTCLIX and LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT. are trademarks of Roche.
© 2007 Roche Diagnostics

www.accu-check.com
Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim



ACCU-CHEK®

Live life. The way you want.