

# ACCU-CHEK® Compact Plus

## Medir la glucemia

El medidor Accu-Chek Compact Plus se entrega con las pilas insertadas y la fecha y la hora ajustadas. El medidor Accu-Chek Compact Plus se codificará automáticamente al insertar el cartucho de tiras reactivas.

### Insertar o reemplazar el cartucho de tiras reactivas



1 Abra la tapa del compartimento del cartucho.



2 Apriete el botón rojo para abrir el cartucho.



3 Incline el medidor hacia delante, así se expulsa el cartucho de tiras reactivas.



4 Introduzca un nuevo cartucho de tiras reactivas.


### Medir la glucemia



1 Empuje hacia abajo la tecla central Test para extraer una tira reactiva.



2 Mantenga el medidor de tal modo que la tira reactiva apunte hacia abajo. Acerque la gota de sangre al canto delantero de la tira reactiva, donde se encuentra la ranura negra. La tira reactiva absorberá la sangre.

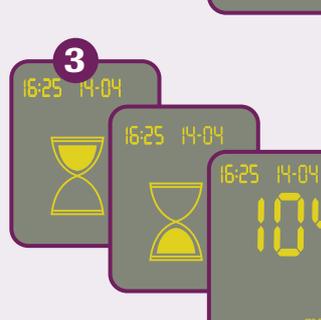

3 Vea el resultado de la medición en la pantalla.



4 Empuje hacia abajo la tecla central Test para expulsar la tira reactiva usada.

# ACCU-CHEK® *Softclix Plus*

El dispositivo de punción Accu-Chek Softclix Plus puede extraerse del medidor Accu-Chek Compact Plus mediante el botón de desbloqueo situado en la cara posterior del medidor, o bien puede utilizarse estando insertado en el medidor.



1 Retire el capuchón del dispositivo de punción.



2 Presione el botón de mando del extremo del dispositivo de punción para expulsar la lanceta usada.



3 Introduzca una nueva lanceta en el portalancetas y empújela hasta que encaje con un clic perceptible.



4 Desenrosque el disco protector de la lanceta.



5 Vuelva a colocar el capuchón en el dispositivo de punción. El capuchón encaja con un clic perceptible.



6 Gire el capuchón hasta la profundidad de punción deseada (11 profundidades en total).



7 Presione el botón de mando hasta el tope. Un tercio del botón de mando vuelve a salir, ahora el dispositivo de punción está armado.



8 Coloque el dispositivo de punción sobre el lugar de punción deseado, vuelva a presionar el botón de mando del extremo del dispositivo de punción hasta que haga clic para obtener la muestra.

El dispositivo de punción Accu-Chek Softclix Plus es apto para el autocontrol del paciente. No se puede utilizar para obtener sangre de diferentes personas porque no se han tomado medidas especiales para la prevención de riesgos de infección.

Esta Gráfica Aclaratoria no sustituye a las instrucciones de uso de su medidor de glucemia Accu-Chek Compact Plus. Observe las advertencias de seguridad en las instrucciones de uso del aparato.

ACCU-CHEK, SOFTCLIX and LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT. are trademarks of Roche.  
© 2007 Roche Diagnostics

[www.accu-check.com](http://www.accu-check.com)  
Roche Diagnostics GmbH  
D-68298 Mannheim



**ACCU-CHEK®**

Live life. The way you want.