












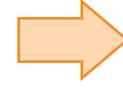


Bu kısa kullanım talimatı, Accu-Chek Go kan şekeri ölçüm cihazınızın ayrıntılı kullanım kılavuzunun yerine geçmez. Lütfen kullanım kılavuzunda yer alan güvenlik bilgilerine mutlaka uyun.

1.

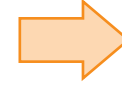


2.

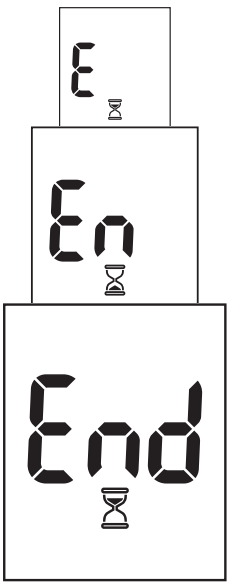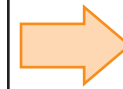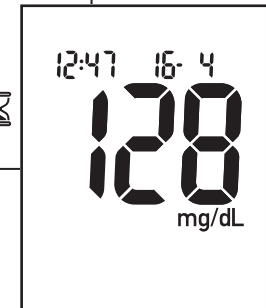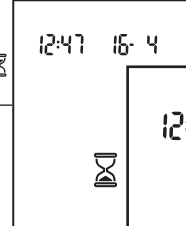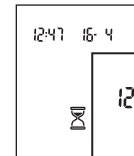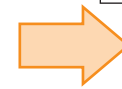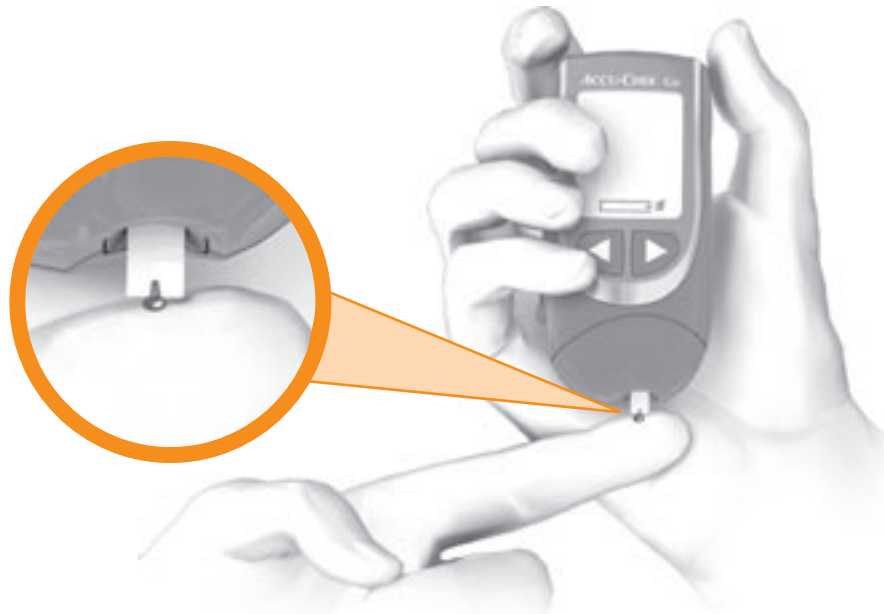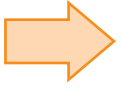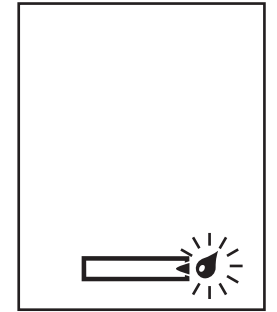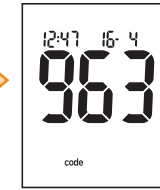


Üst ve Yan Taraflar

- ① tuşu: Açma veya kapama, ayarların değiştirilmesi için kurulumun başlatılması, girdilerin kaydedilmesi
- ② Ekran (LCD)
- ③ ve tuşları: Ayarların değiştirilmesi (aşağı veya yukarı sayma), kayıtlı ölçüm değerlerinin çağırılması, ortalama değerlerin çağırılması
- ④ Test sribi yuvası – test sribi buraya sokulur
- ⑤ Ölçüm camı kapağı
- ⑥ Test sribini çıkartma düğmesi
- ⑦ Kod çipi
- ⑧ Ölçüm değerlerinin, örneğin bir bilgisayara aktarılması için kızıltötesi arabirim

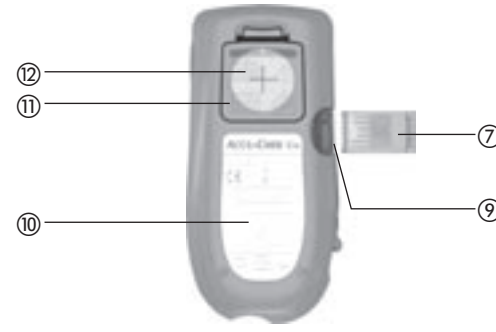

Alt Taraf

- ⑦ Kod çipi
- ⑨ Kod çipi yuvası
- ⑩ Tip plakası
- ⑪ Pil bölmesi
- ⑫ Pil (CR 2032 tipi)

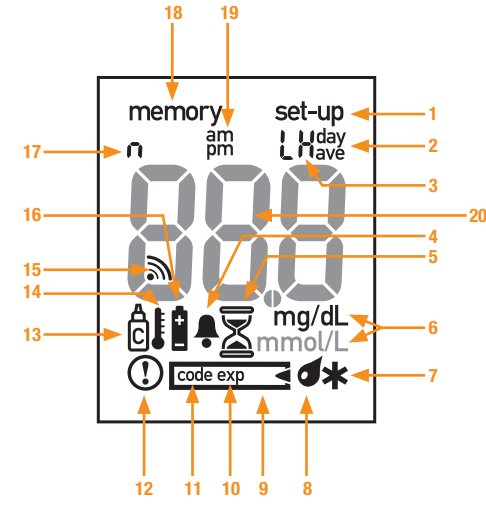


- 1 Ölçüm cihazı Kurulumda
- 2 Ortalama değer ekranında: Dikkate alınan gün sayısı
- 3 LH veya LL: Hedef değer aralığının ayarı (Kurulum)
- 4 Test hatırlatması açık, yanıp sönüyor: Test hatırlatması sırasında optik bilgilendirme
- 5 Ölçüm veya ortalama değerlerin hesaplanması işlemi sürüyor
- 6 Kan şekeri ölçüm değeri birimi
- 7 Özel ölçüm değeri için işaretleme
- 8 yanıp sönüyor: Kanın test sribine emdirilmesi gerektiği hatırlatması
- 9 yanıp sönüyor: Test sribinin takılması gerektiği hatırlatması
- 10 Test sribinin son kullanım tarihi geçmiştir
- 11 Kod numarası göstergesi, yanıp sönüyor: Kod çipi yok
- 12 Hedef değer aralığı ayarı (Kurulum), yanıp sönüyor: Ölçüm değeri hedef değer aralığının dışında
- 13 İşlev kontrolü işaretlemesi
- 14 yanıp sönüyor: Sıcaklık izin verilen aralığın dışında
- 15 Sinyal sesi veya sesli mod açık
- 16 yanıp sönüyor: Pil zayıflıyor
- 17 Ortalama değer ekranında: Dikkate alınan ölçüm değerleri sayısı
- 18 Ölçüm değeri belleği, ortalama değerlerin veya ölçüm değerlerinin aktarılması
- 19 12 saatlik saat formatına ilave

20 Rakam ekranı alanındaki mesajlar

- Kod çipi yok; ölçüm değeri belleğinde: Ölçüm değeri kayıtlı değil, ortalama değer hesaplaması yapılamıyor veya ölçüm değeri silindi,
- AL Test hatırlatması ayarı (Kurulum)
- CLr yanıp sönüyor: Son ölçüm değerinin silinmesi
- End Kurulum sonu, ölçüm veya aktarımdan sonra yapılan kendi kendine test tamamlanmıştır
- F Hızlı Kurulumda: Bir grubun seçilmesi
- H Ölçüm değeri >600 mg/dL (33,3 mmol/L)
- Lo Ölçüm değeri <10 mg/dL (0,6 mmol/L)
- PC Ölçüm değerlerinin aktarılması

Hızlı Kurulum: Ayarların Değiştirilmesi

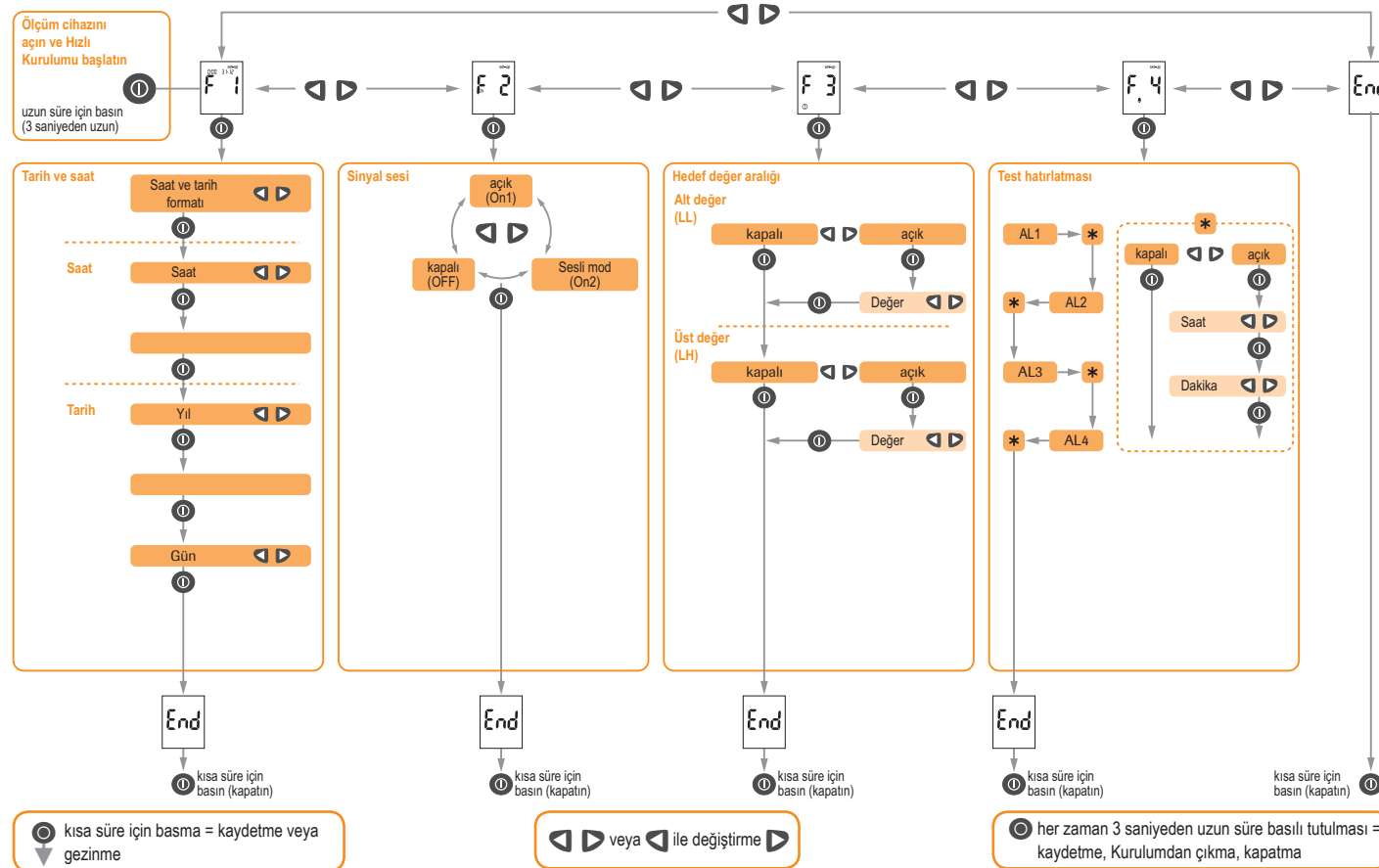

Hata mesajları

- E-1 Test sribi yanlış takıldı, test sribi büküldü/hareket ettirildi, güçlü elektromanyetik alan
- E-2 Başka sisteme ait kod çipi, kod çipi okunmuyor, kod çipi arızalı, kod çipi ölçüm sırasında çıkarıldı
- E-4 Ölçüm camı kirli, kan test sribine erken emdirildi, test sribi büküldü/hareket ettirildi, kullanılmış test sribi kullanıldı, test sribinin kullanım tarihi geçmiş, ölçümden sonra yeni bir test sribi erken (End görüntülenirken) sokuldu
- E-6 Test sribi az kan emdi, kan test sribine erken emdirildi, test sribi büküldü/hareket ettirildi, pil boş, ölçüm cihazı hatası, güçlü elektromanyetik alan
- EEE Ölçüm cihazı hatası
- ttt Sıcaklık ölçüm için çok yüksek veya çok düşük